




*Инновационные технологии
в имплантологии*

КАТАЛОГ

УЗКАЯ ПЛАТФОРМА



ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ

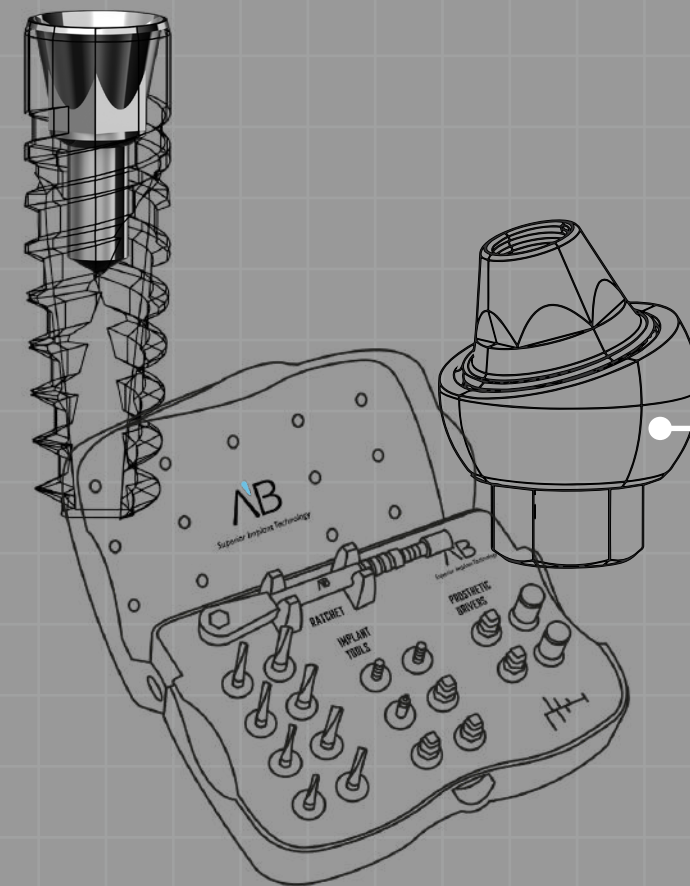

ВСТУПЛЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

Вступление

Приветствую вас, дорогие друзья!

Меня зовут Борис Фридзон, я зубной техник и инженер-разработчик медицинской продукции.

Я представляю компанию AB Dental - инноватора в области дентальной имплантологии. Имея опыт работы в имплантологии более 25 лет, буду рад содействовать в выборе нашей продукции и услуг, а также образованию и профессиональному росту.

Предоставляя наш продукт, мы гарантируем безупречное качество и инновационный подход, которые позволят вам выполнять процедуры на высшем уровне.

Я считаю, что большая часть успеха зависит от качественной продукции, оборудования и образованности специалиста. Я рекомендую вам продукцию AB Dental, как путь к успеху, в котором присутствует качество и комфорт в работе.

AB Dental расширяет границы для совершенства стоматологической помощи.

С наилучшими пожеланиями,
Борис Фридзон.
Глава представительства AB Dental
в России и странах СНГ



О КОМПАНИИ	04
ИМПЛАНТАТЫ AB DENTAL	06
ДЕНТАЛЬНЫЕ ИМПЛАНТАТЫ	08
+ Хирургический протокол	10
+ Дентальные имплантаты	14
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ	24
УЗКАЯ ПЛАТФОРМА	26
+ Таблица ортопедических элементов	26
+ Формирователи десны	28
+ Трансферы	29
+ Аналоги	32
+ Протезирование на основе цементной фиксации	33
+ Протезирование на основе винтовой фиксации	44
+ Условно-съёмное протезирование	50
+ Цифровые решения Cad/Cam	39

Продукция AB Dental Devices прошла проверку Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и имеет Европейский сертификат соответствия (CE) в соответствии с Директивой Совета 93/42/ЕЕС и Поправкой 2007/47/ЕС. Ассортимент продукции в каждой стране может варьироваться в зависимости от требований местных регулирующих органов. AB Dental Devices руководствуется нормами стандарта EN ISO 13485:2016 и Канадской системы оценки соответствия медицинского оборудования (CMDCAS).



О КОМПАНИИ

AB Dental - динамичная и инновационная компания, предоставляющая стоматологам комплексное решение, которое включает компьютерное планирование дентальной имплантации и производство челюстно-лицевых имплантатов, методом лазерного спекания.

Мы специализируемся на разработке, изготовлении и реализации дентальных имплантатов, материалов для протезирования и хирургических инструментов, применяя при этом новейшие технологии и накопленный за многие годы работы в этой сфере опыт.

УНИКАЛЬНОЕ КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИК ОТ КОМПАНИИ AB Dental

- + Компьютерное планирование дентальной имплантации.
- + Печать хирургических шаблонов в формате 3D.
- + Изготовление индивидуальных дентальных имплантатов методом лазерного спекания.
- + Широкий выбор имплантатов, ортопедических элементов для протезирования, инструментов, аксессуаров и CAD/CAM технологий, необходимых для успешного проведения операций.

Продукция компании AB Dental полностью соответствует высочайшим международным стандартам, имеет Европейский сертификат соответствия (CE), а также одобрена соответствующими регулирующими органами во многих странах. А также Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) в США, Китае, Индии, Тайване, организацией AMAR в Израиле, Австралийской администрацией лекарственных средств (TGA), Министерствами здравоохранения Российской Федерации и странах СНГ.



НАША МИССИЯ - РАЗВИВАТЬ РЫНОК СОВМЕСТНО С ПОКОЛЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ. МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО УСЛУГИ, - МЫ ПРИДЕРЖИВАЕМСЯ УРОВНЯ ВЫСОКИХ СТАНДАРТОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Инновационные технологии. Можно смело сказать, что мы задаем тренд в сфере дентальной имплантологии, продолжая совершенствовать и расширять нашу линейку продукции, предлагая самые передовые технологии.

Патенты и индивидуальные решения. Уникальные запатентованные высокоточные технологии предоставляют нашим клиентам неоспоримое преимущество на рынке стоматологических услуг. Широкий выбор продукции в нашей компании позволяет стоматологическим клиникам предлагать своим пациентам разнообразные и качественные решения. Творческий подход, новейшие научные исследования и разработки, а также уникальная маркетинговая модель предоставляют нам возможность моментально реагировать на постоянно меняющиеся требования в рамках современного рынка.

Современное образование. Наша компания предлагает обучение стоматологов всех специализаций, а также и зубных техников, применяющих на практике продукцию нашей компании.

Персонал и клиенты компании. Мы прекрасно понимаем, что профессиональный персонал является залогом успеха компании, а залог успеха - выстроенные партнерские отношения с клиентами.



ИМПЛАНТАТЫ АВ Dental

ШИРОКИЙ ВЫБОР ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ ДЛЯ ВСЕХ ПЛАТФОРМ И РАЗМЕРОВ (КОРОТКИХ / ДЛИННЫХ / ШИРОКИХ), УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН КАЖДОГО ИМПЛАНТАТА ПОЗВОЛЯЕТ ЭФФЕКТИВНО РЕШАТЬ КЛИНИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

Одноэтапные
имплантаты


Коническая платформа

Узкая платформа

Двухэтапные имплантаты
с уникальной двойной
платформой

ПЕРЕКЛЮЧАЮЩАЯСЯ ПЛАТФОРМА

Долговременные эстетические результаты достигаются с помощью увеличения объема мягких тканей и установки имплантатов с абатментами меньшего диаметра для сохранения оптимального уровня альвеолярного гребня.

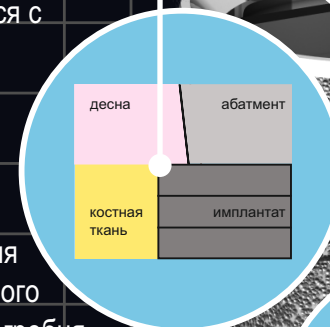

ДВОЙНАЯ ПЛАТФОРМА

Дизайн имплантатов разрабатывается с учетом возможности применения двух операционных платформ:

- глубокое соединение (внутренний шестигранник 1,8 мм), подходит для всех абатментов с анторотационным шестигранным соединением;
- плоское разъемное соединение (0,2 мм), созданное специально для анторотационных абатментов без шестигранника.

КОЛЬЦА НА ШЕЙКЕ ИМПЛАНТАТА


Обеспечивают дополнительное соединение между костной тканью и имплантатом в области альвеолярного гребня

ДВОЙНАЯ РЕЗЬБА



Благодаря плоской резьбе достигается высокая первичная стабильность, а острая резьба значительно облегчает процесс установки имплантатов, при этом минимально травмируя костную ткань.

БИОЛОГИЧЕСКИ СОВМЕСТИМАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Имплантаты обрабатываются специализированными технологиями, разработанными нашей компанией благодаря этому имплантат приобретает шероховатость, положительно влияющую на процесс остеоинтеграции.

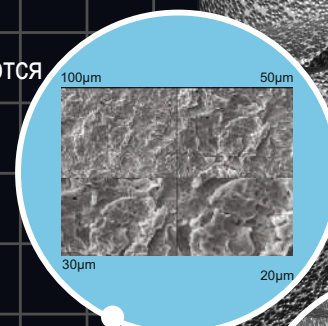

ДЕНТАЛЬНЫЕ ИМПЛАНТАТЫ

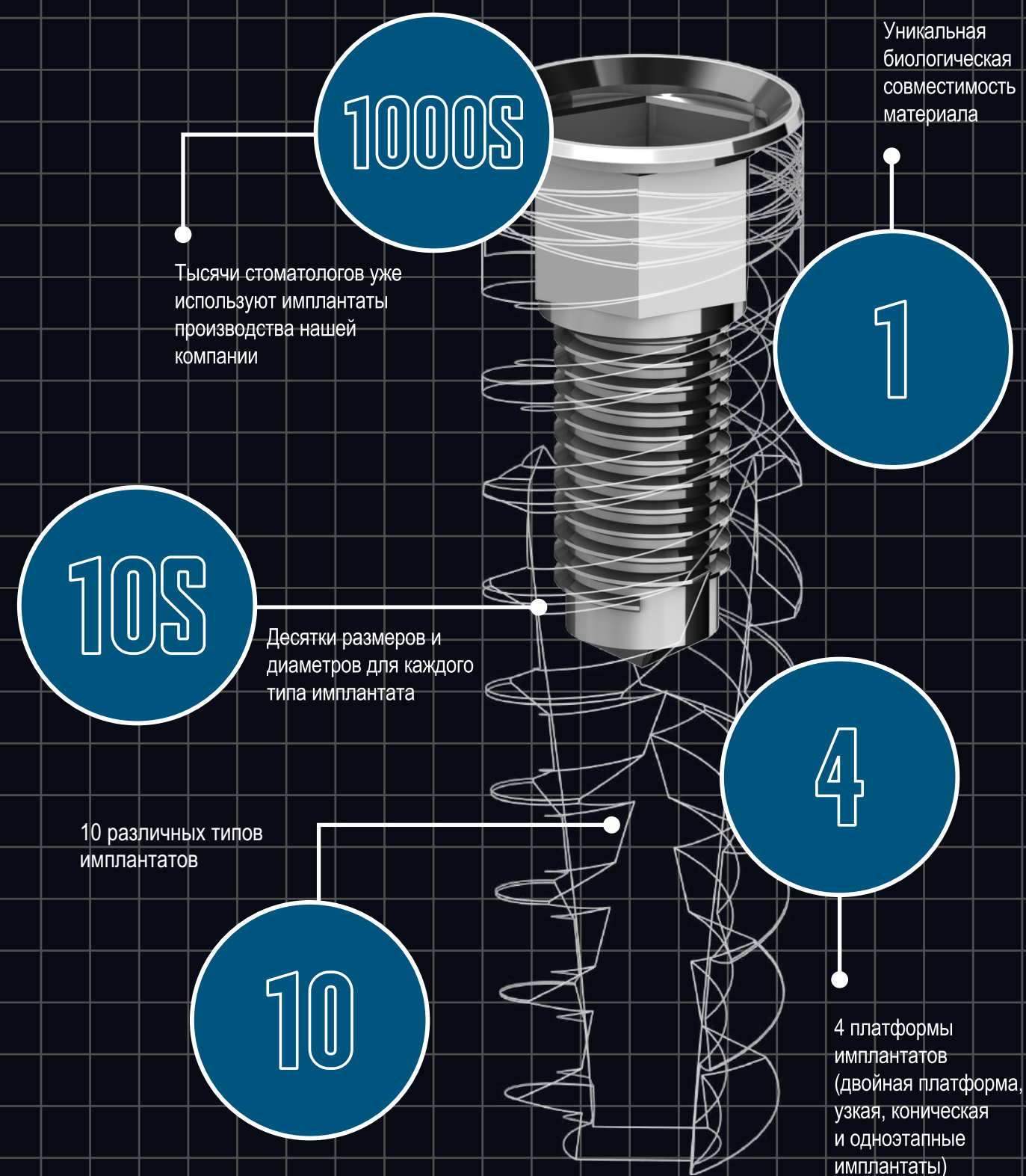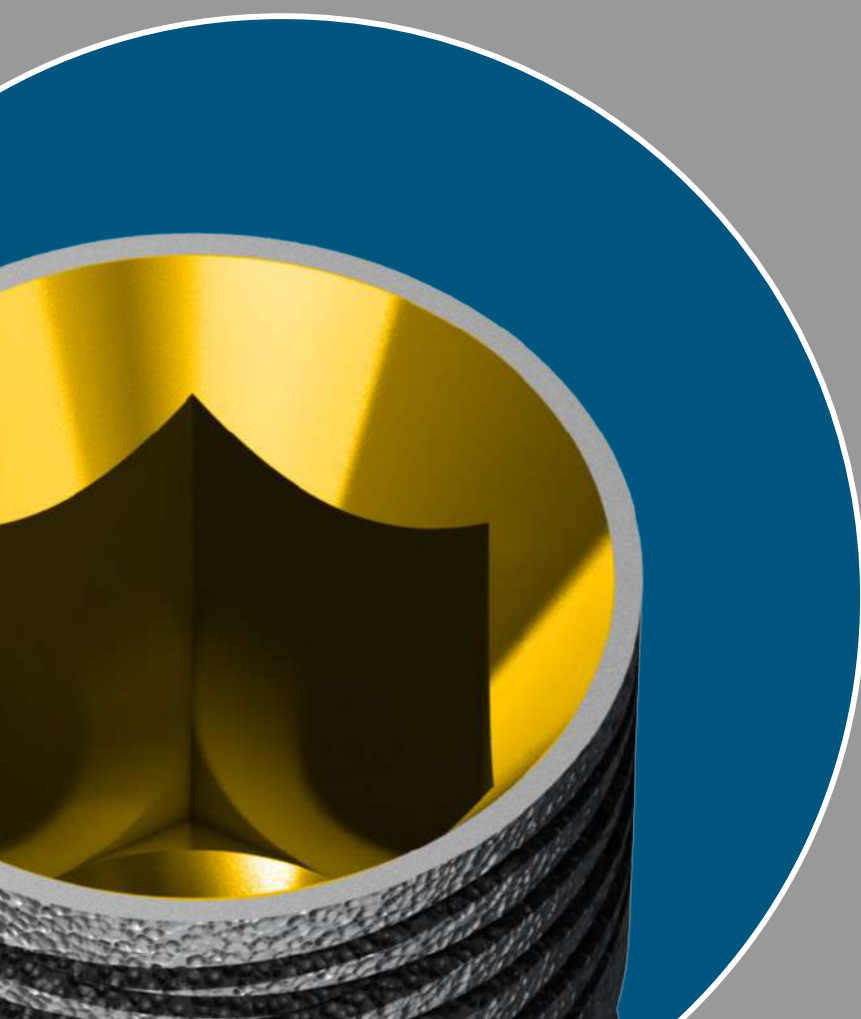

ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ




ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТОКОЛ СО СТУПЕНЧАТОЙ ФРЕЗОЙ С ПОКРЫТИЕМ

		TD	TPDD	TDS	TDS	TDS	TDS	TDS	TDS	TDS	TDS
Диаметр фрезы (мм)		Ø 1.9	Ø 2	Ø 2.5	Ø 2.8	Ø 3.2	Ø 3.65	Ø 4.0	Ø 4.5	Ø 5.0	Ø 5.5
Скорость (об/мин)		1200-1500	900-1200	800-1000	500-700	400-700	400-600	400-600	300-500	200-400	200-400
TD	Бор маркирующий										
TD	Фреза пилотная спиральная										
TDS	Ступенчатая фреза										
Диаметр имплантата	Тип кости										
Ø2.4	мягкая	●	●								
	твердая	●	●								
Ø3	мягкая	●	●								
	твердая	●	●	● опция							
Ø3.3	мягкая	●	●								
	твердая	●	●	● опция							
Ø3.5	мягкая	●	●	●							
	твердая	●	●	●	● опция						
Ø3.75	мягкая	●	●	●	● опция						
	твердая	●	●	●	● опция	● опция					
Ø4.2	мягкая	●	●	●	●	● опция					
	твердая	●	●	●	●	● опция	● опция				
Ø4.5	мягкая	●	●	●	●	●	● опция				
	твердая	●	●	●	●	●	● опция	● опция			
Ø5	мягкая	●	●	●	●	●	●	● опция			
	твердая	●	●	●	●	●	●	● опция	● опция		
Ø6	мягкая	●	●	●	●	●	●	●	● опция		
	твердая	●	●	●	●	●	●	●	● опция	● опция	©

● Маркировать участок сверления
 ● Сверлить на всю длину имплантата
 ● Перфорировать кортикальную пластинку при необходимости
 ● Цветовая маркировка указывает на цвет финишной фрезы
 © Перфорируют кортикальную пластинку с помощью развертки при необходимости


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ-РАЗВЕРТКИ

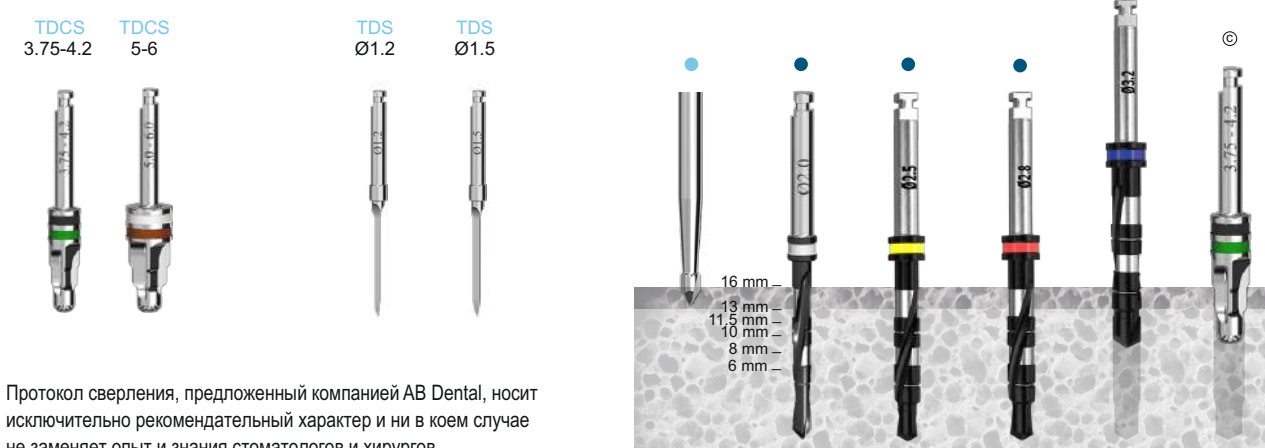


Протокол сверления, предложенный компанией AB Dental, носит исключительно рекомендательный характер и ни в коем случае не заменяет опыт и знания стоматологов и хирургов.

ПРОТОКОЛ СВЕРЛЕНИЯ ИМПЛАНТАТОВ


РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТОКОЛ СВЕРЛЕНИЯ

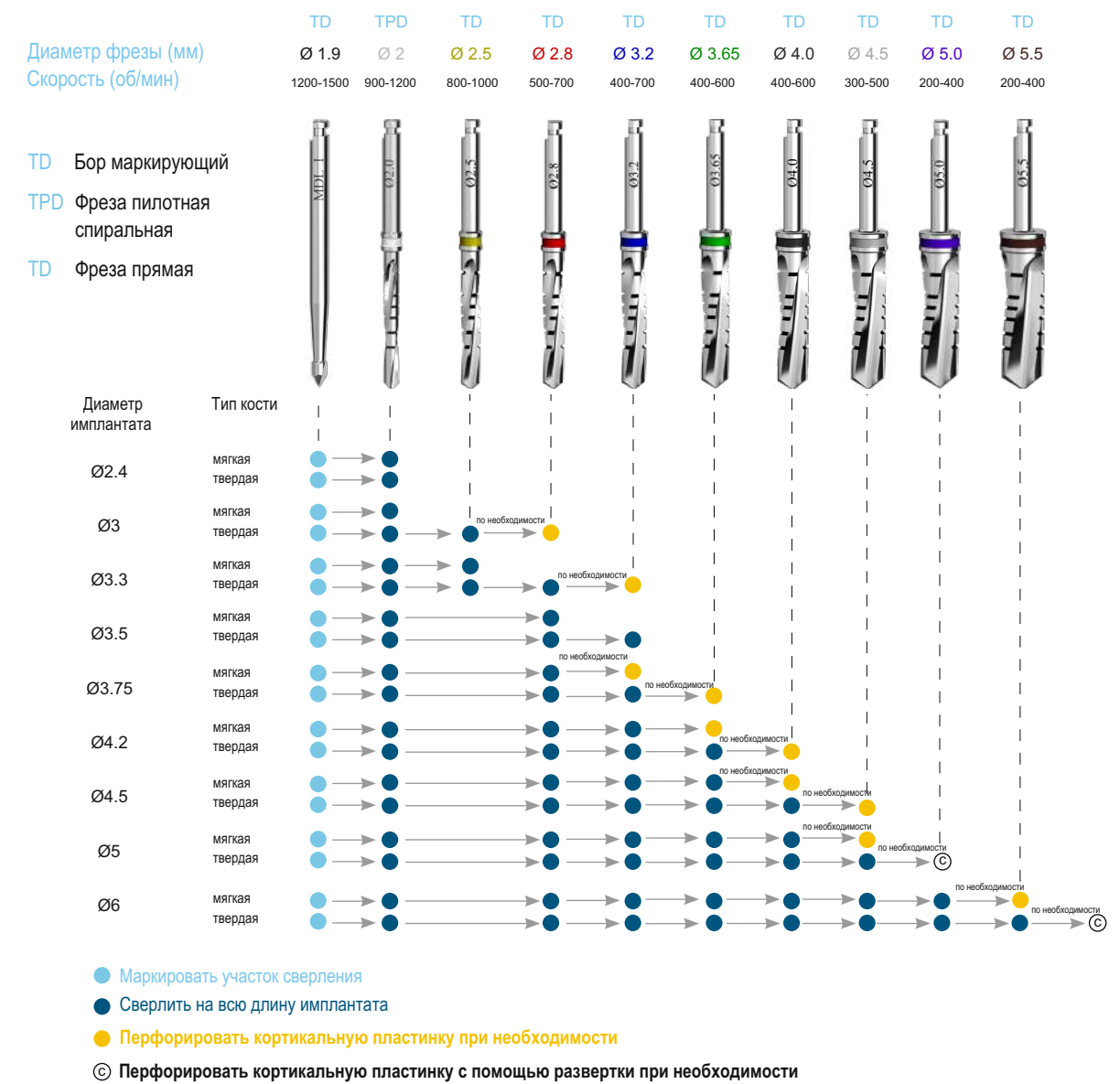


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ-РАЗВЕРТКИ

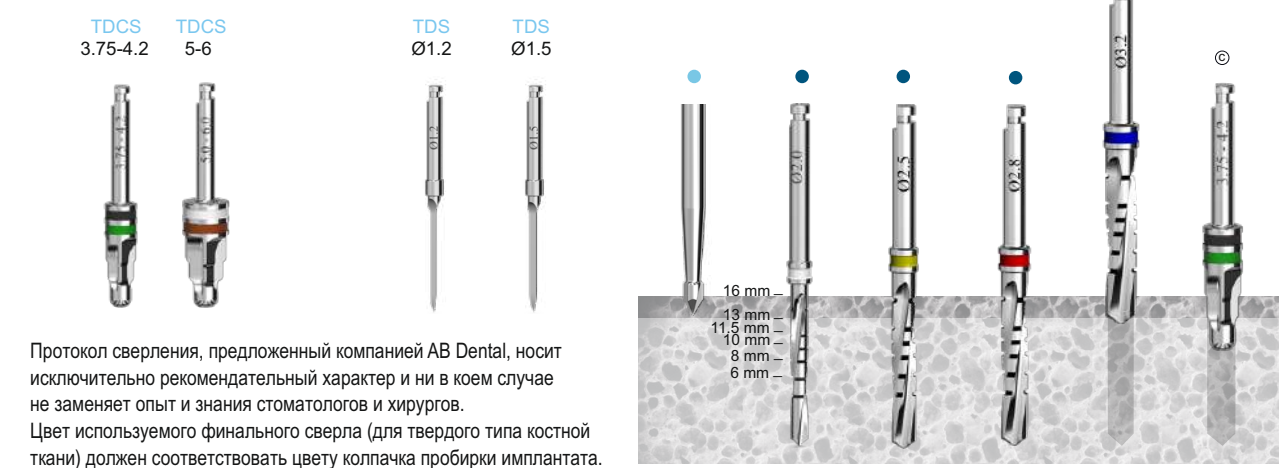


РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТОКОЛ СВЕРЛЕНИЯ С КОНИЧЕСКИМ СВЕРЛОМ СО СТОПЕРОМ

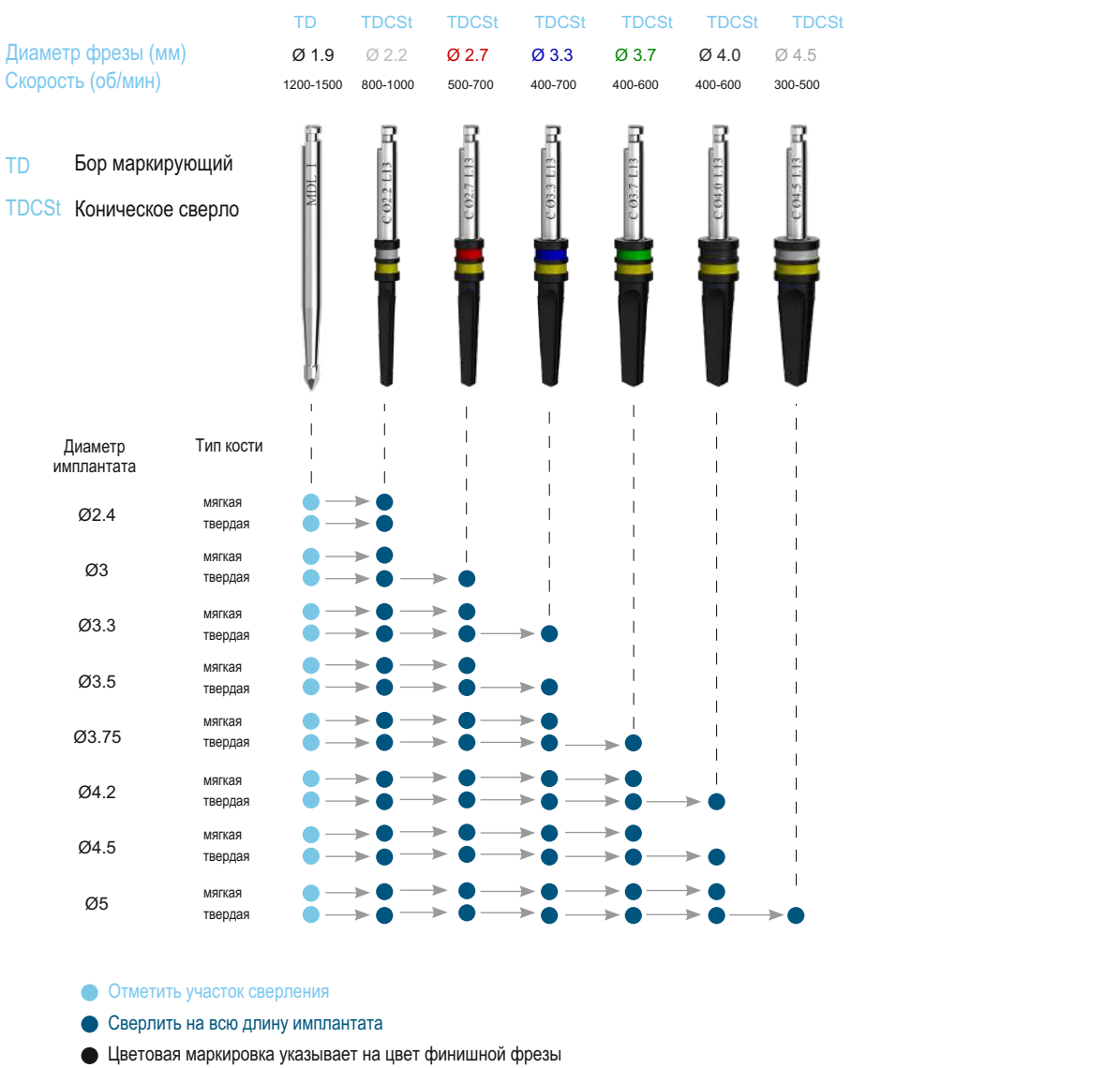

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ-РАЗВЕРТКИ

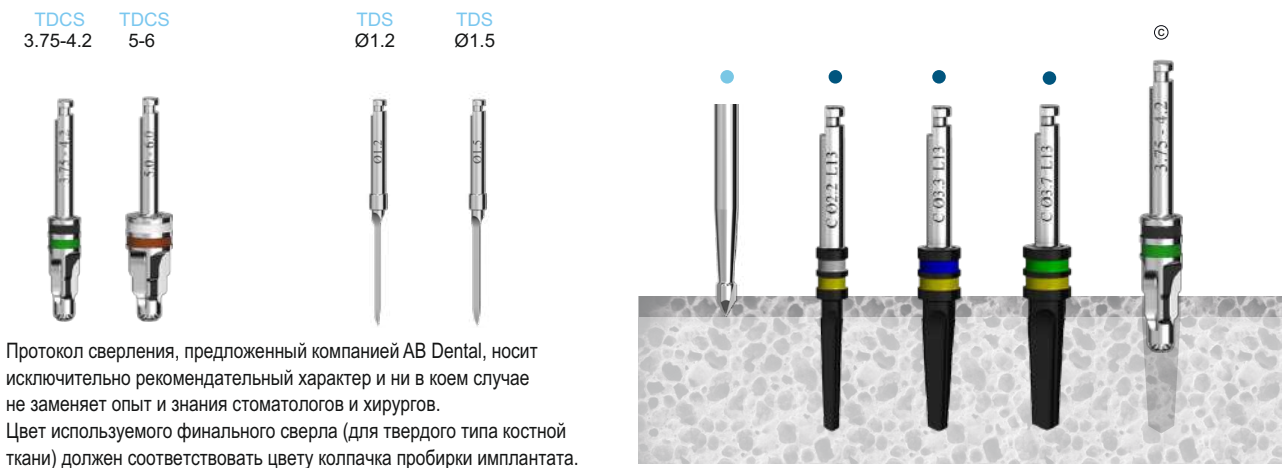

ИМПЛАНТАТ I5

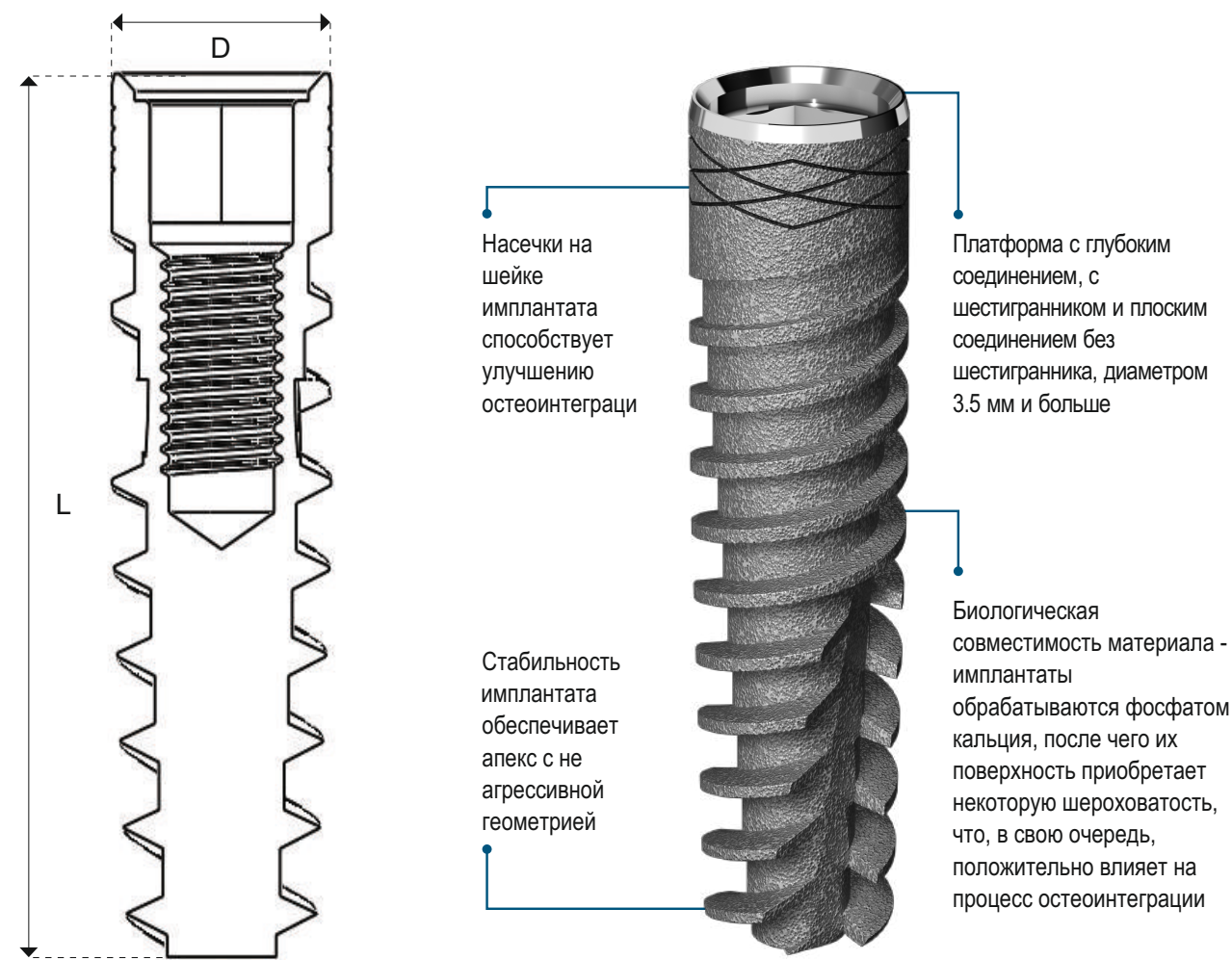

Артикул	D (mm)	Платформа	L (мм)	Цветовая маркировка колпачка	Наличие имплантоввода
I5	3	Узкая	10, 11.5, 13, 16	○	с/без имплантоввода
I5	3.2/3.3	Узкая	10, 11.5, 13, 16	●	с/без имплантоввода

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТОКОЛ СВЕРЛЕНИЯ




СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Имплантаты AB Dental могут поставляться в упаковке с имплантовводом или без имплантоввода.

С ИМПЛАНТОВВОДОМ



БЕЗ ИМПЛАНТОВВОДА

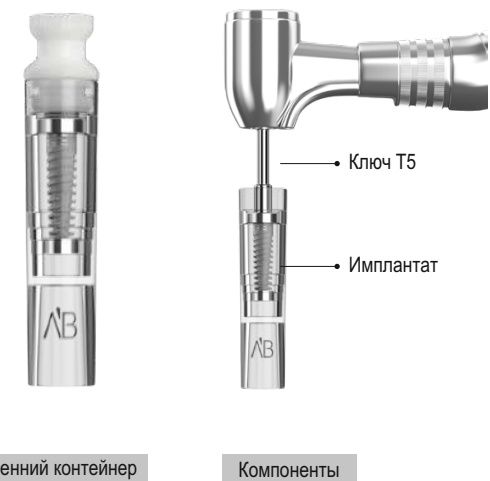


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ-РАЗВЕРТКИ




Протокол сверления, предложенный компанией AB Dental, носит исключительно рекомендательный характер и ни в коем случае не заменяет опыт и знания стоматологов и хирургов. Цвет используемого финального сверла (для твердого типа костной ткани) должен соответствовать цвету колпачка пробирки имплантата.

ИМПЛАНТАТ I55

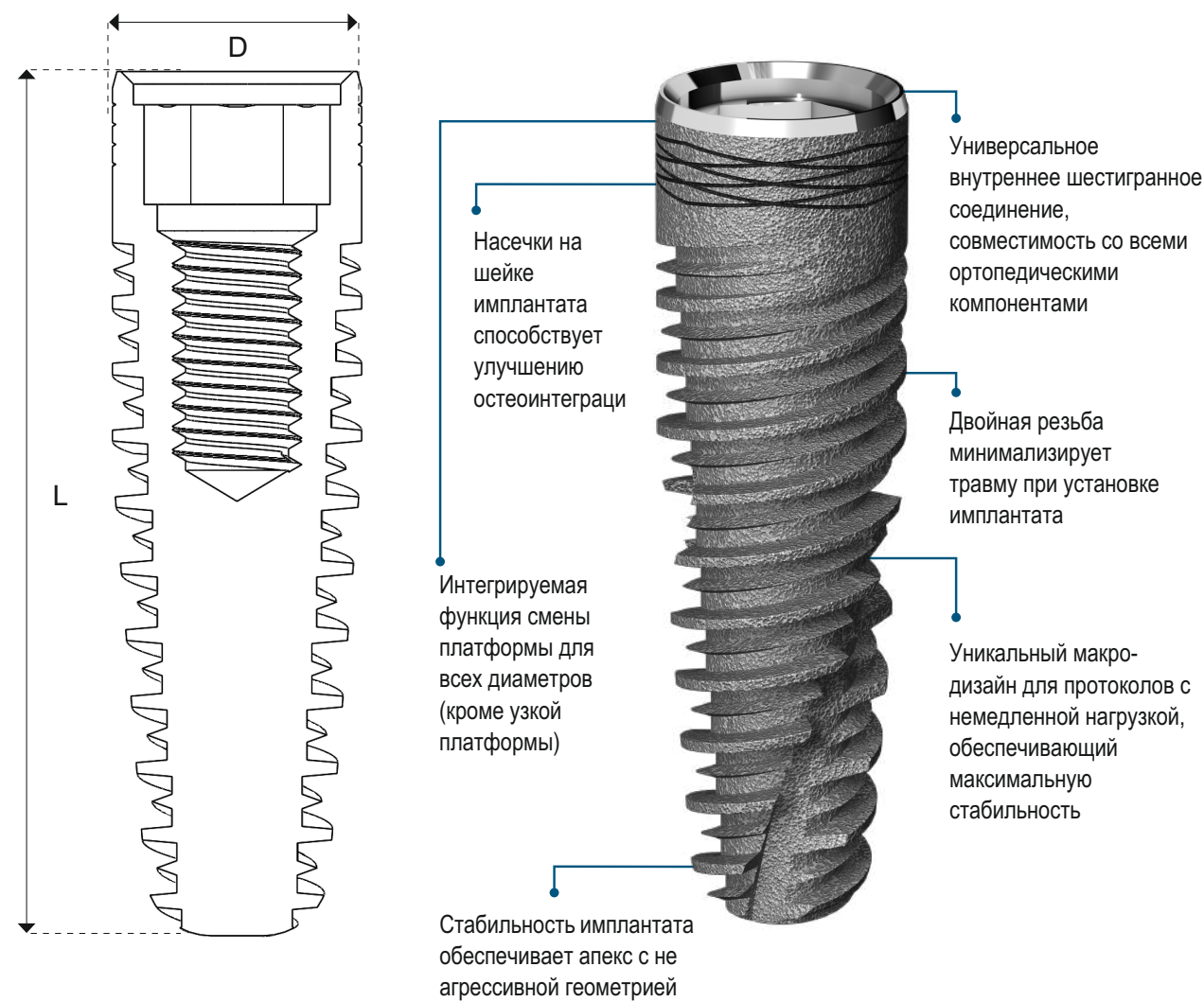

Артикул	D (mm)	Платформа	L (мм)	Цветовая маркировка колпачка	Наличие имплантоввода
I55	3	Узкая	10, 11.5, 13, 16	○	с/без имплантоввода
I55	3.3	Узкая	10, 11.5, 13, 16	●	с/без имплантоввода

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТОКОЛ СВЕРЛЕНИЯ

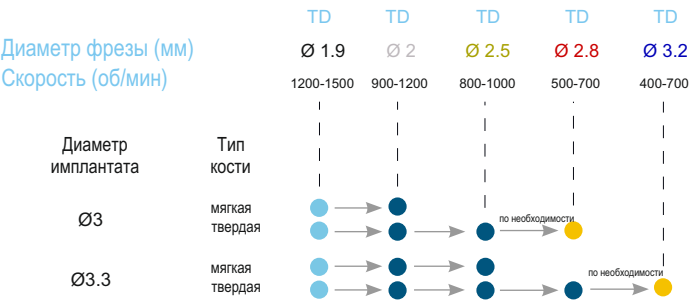

- TD Бор маркирующий
- TD Фреза пилотная спиральная
- TD Фреза прямая
- Маркировать участок сверления
- Сверлить на всю длину имплантата
- Перфорировать кортикальную пластинку при необходимости
- © Перфорировать кортикальную пластинку с помощью развертки при необходимости
- Цветовая маркировка указывает на цвет финишной фрезы

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ-РАЗВЕРТКИ



Протокол сверления, предложенный компанией AB Dental, носит исключительно рекомендательный характер и ни в коем случае не заменяет опыт и знания стоматологов и хирургов. Цвет используемого финального сверла (для твердого типа костной ткани) должен соответствовать цвету колпачка пробирки имплантата.


СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Имплантаты AB Dental могут поставляться в упаковке с имплантовводом или без имплантоввода.


С ИМПЛАНТОВВОДОМ



БЕЗ ИМПЛАНТОВВОДА

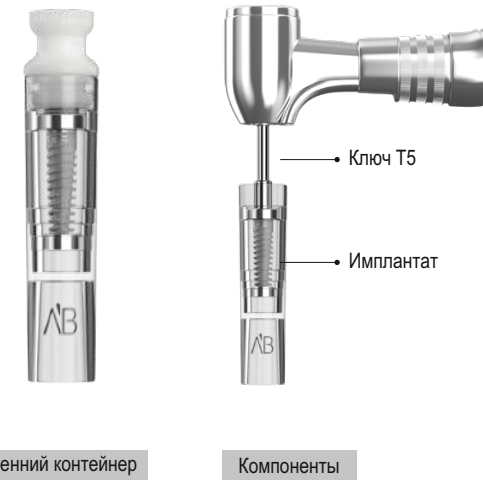

ИМПЛАНТАТ ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ I10

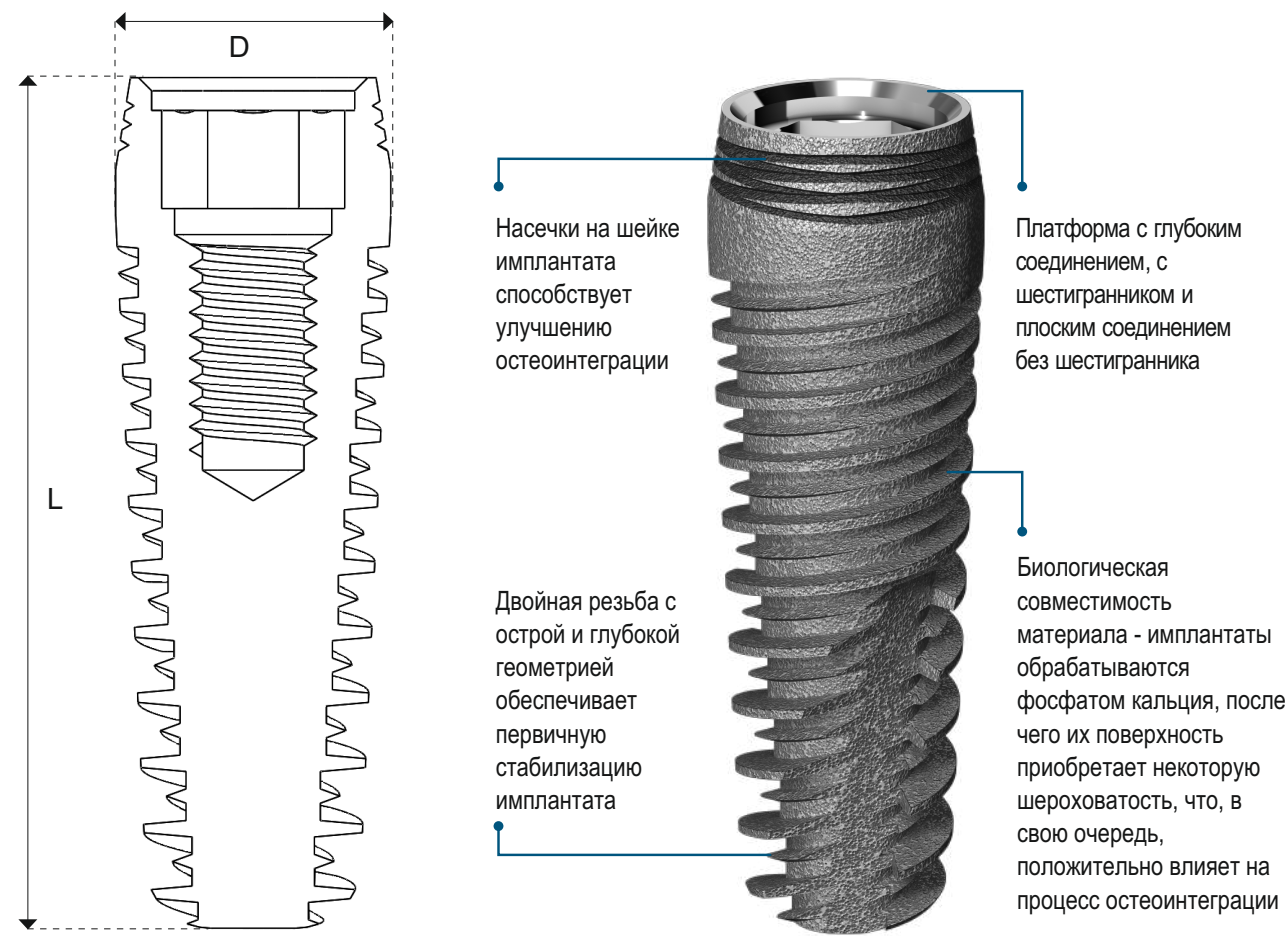

Артикул	D (mm)	Платформа	L (mm)	Цветовая маркировка колпачка	Наличие имплантоввода
I10	3.75	Узкая	8, 10, 11.5, 13, 16		с/без имплантоввода

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТОКОЛ СВЕРЛЕНИЯ

	TD	TD	TD	TD	TD
Диаметр фрезы (мм)	Ø 1.9	Ø 2	Ø 2.5	Ø 2.8	Ø 3.2
Скорость (об/мин)	1200-1500	900-1200	800-1000	500-700	400-700

Диаметр имплантата	Тип кости	TD	TD	TD	TD	TD
Ø3.75	мягкая	●	●	○	●	●
	твердая	●	●	○	●	●

- TD Бор маркирующий
- TD Фреза пилотная спиральная
- TD Фреза прямая
- Отметить участок сверления
- Сверлить на всю длину имплантата
- Просверлить кортикальную пластинку при необходимости
- © Сверлить сквозь кортикальную пластинку с помощью развертки при необходимости
- Цветовая маркировка указывает на цвет финишной фрезы


СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Имплантаты AB Dental могут поставляться в упаковке с имплантовводом или без имплантоввода.

С ИМПЛАНТОВВОДОМ



БЕЗ ИМПЛАНТОВВОДА

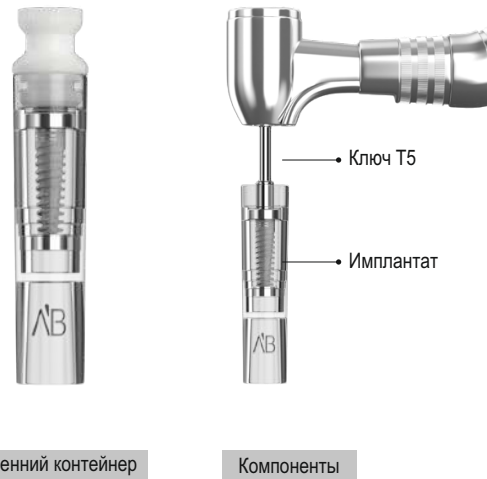


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ-РАЗВЕРТКИ




Протокол сверления, предложенный компанией AB Dental, носит исключительно рекомендательный характер и ни в коем случае не заменяет опыт и знания стоматологов и хирургов. Цвет используемого финального сверла (для твердого типа костной ткани) должен соответствовать цвету колпачка пробирки имплантата.

ИМПЛАНТАТ ОДНОЭТАПНЫЙ I6

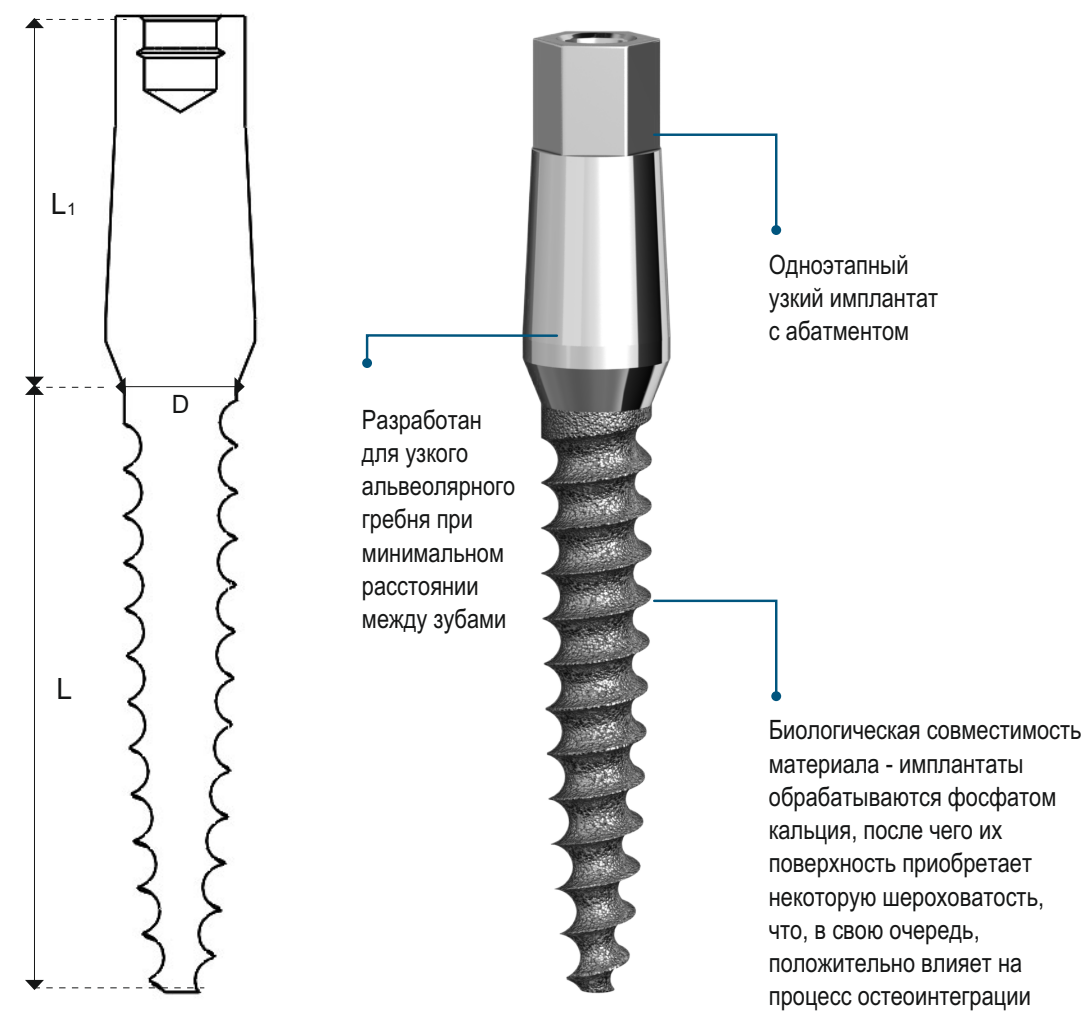

Артикул	D (mm)	L (mm)	L ₁ (mm)	Цветовая маркировка колпачка	Наличие имплантоввода
I6	2.4	11.5, 13, 16	7	○	с имплантовводом
I6	3	10, 11.5, 13, 16	7	○	с имплантовводом

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТОКОЛ СВЕРЛЕНИЯ

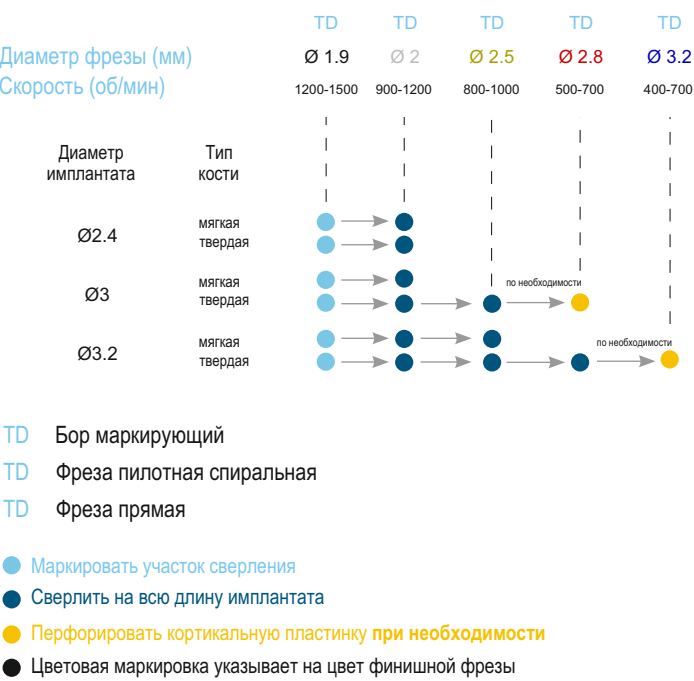

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ




СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ



Протокол сверления, предложенный компанией AB Dental, носит исключительно рекомендательный характер и ни в коем случае не заменяет опыт и знания стоматологов и хирургов. Цвет используемого финального сверла (для твердого типа костной ткани) должен соответствовать цвету колпачка пробирки имплантата.

ИМПЛАНТАТ ОДНОЭТАПНЫЙ С ШАРОВИДНЫМ АТТАЧМЕНТОМ I6b

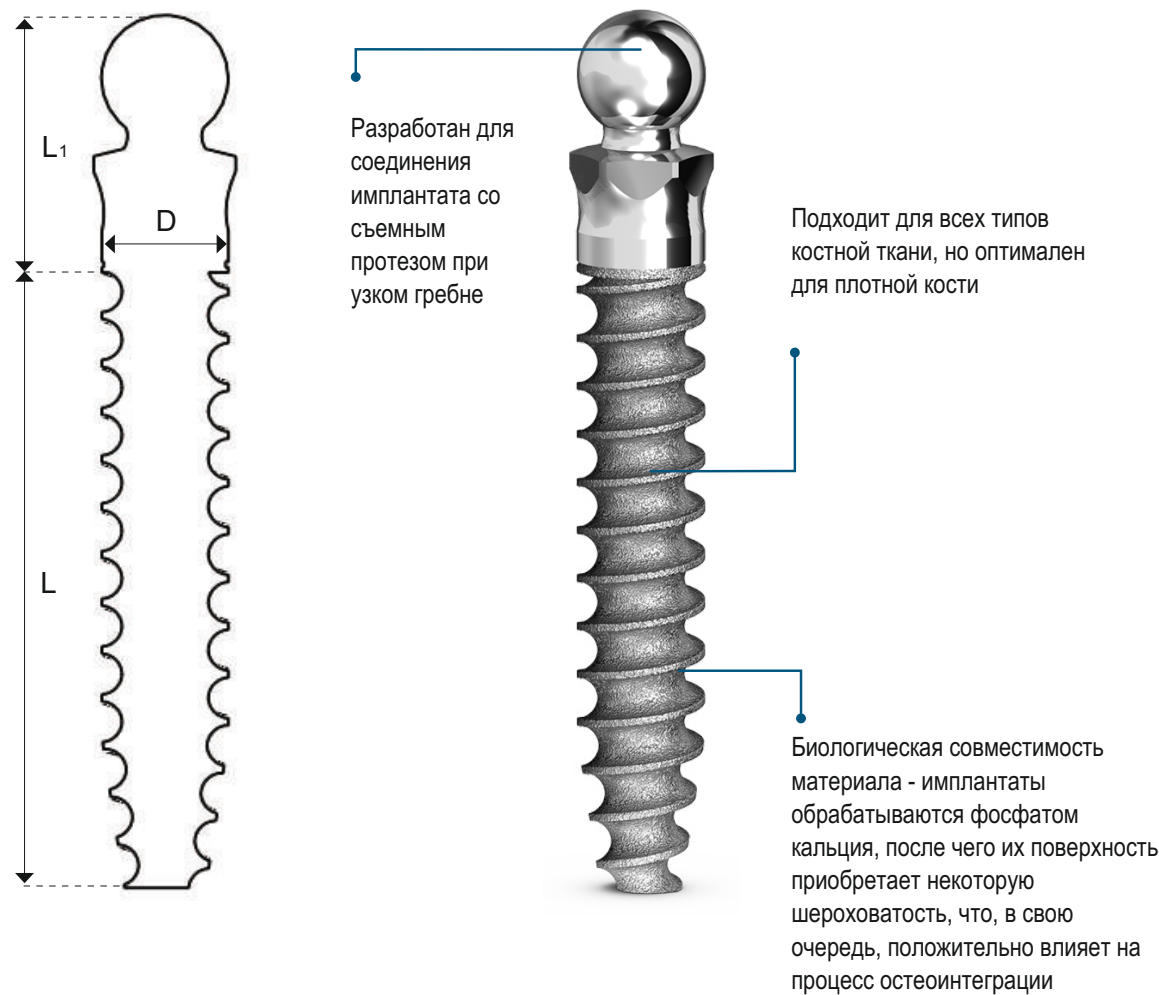

Артикул	D (mm)	L (mm)	L ₁ (mm)	Цветовая маркировка колпачка	Наличие имплантоввода
I6b	2.4	11.5, 13	6	○	с имплантовводом

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТОКОЛ СВЕРЛЕНИЯ

		TD		TD	
		Ø 1.9		Ø 2	
		1200-1500		900-1200	
Диаметр имплантата	Тип кости				
Ø2.4	мягкая	●	→	●	
	твердая	●	→	●	


TD Бор маркирующий

TD Фреза пилотная спиральная

- Маркировать участок сверления
- Сверлить на всю длину имплантата
- Цветовая маркировка указывает на цвет финишной фрезы

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

3 мм в диаметре
Миниатюрное гибридное
соединение: конус 60° и
шестигранник 2 мм

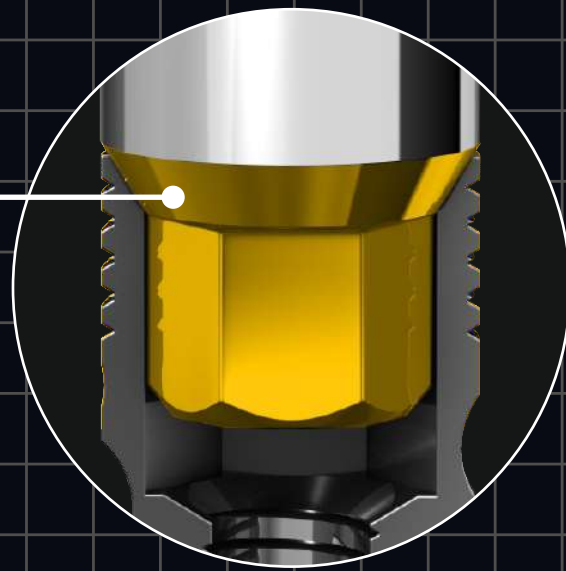

60

60 ортопедических
решений для имплантатов,
установленных под
наклоном

105


Десятки ортопедических
компонентов для
протезирования
различных размеров,
диаметров, с разным
углом наклона и для
удобства стоматологов,
экономии времени и
максимальной
эффективности
проводимых операций

3

3 технологии протезирования
(с цементной фиксацией,
винтовой фиксацией и условно-
съемным протезированием)





8

8 международных
зарегистрированных патентов
в области ортопедической
стоматологии

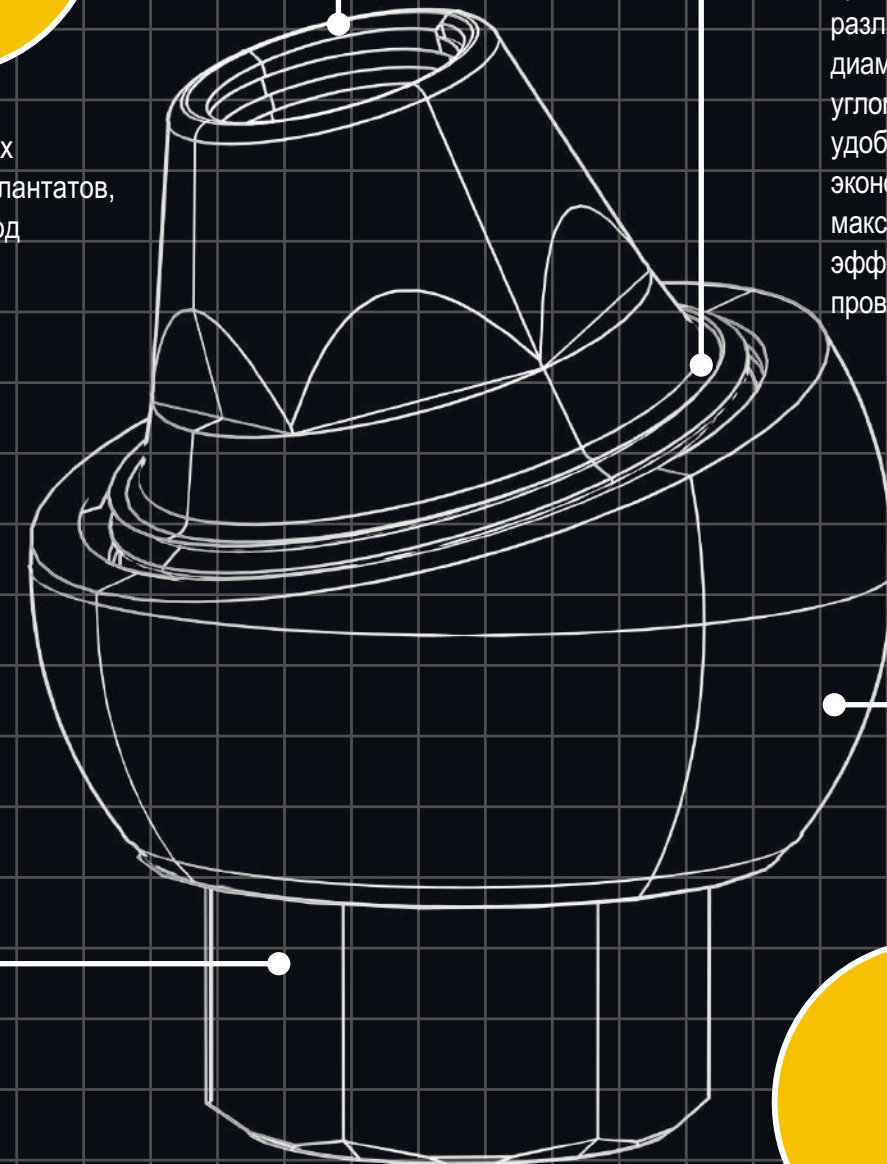

УЗКАЯ ПЛАТФОРМА


Последовательность представления изделий обусловлена техникой снятия оттисков с уровня имплантатов. Также имеется возможность снятия оттисков после установки имплантата с уровня абатмента.

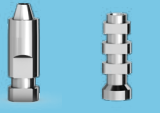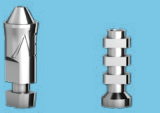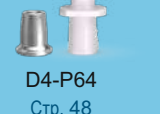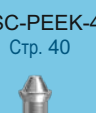	Формирователи десны	Трансферы / Компоненты для оттисков/ Аналоги		Абатменты
		Трансферы / аналоги	Лабораторные	Временные
Протезирование на основе цементной фиксации	 P0-3 Стр. 28	 D1-3 Стр. 32	 P3SC-PEEK-3 Стр. 42	 P3S-PEEK-3 Стр. 34
		 D2-3 Стр. 29 D2O-3 Стр. 29	 D1-P14 Стр. 46 D2-P14 Стр. 46	 P14-bT Стр. 46
Протезирование на основе винтовой фиксации	 P0-P14 Стр. 46	 D1-P64 Стр. 48 D2-P64 Стр. 48	 P3SC-PEEK-3,2 Стр. 40	 P16 Стр. 47
		 P0-P64 Стр. 48	 D1-P64 Стр. 48 D2-P64 Стр. 48	 P3SC-PEEK-4,2 Стр. 40
Условно-съемное протезирование	 D4 Стр. 31	 D3-3 Стр. 30 D3W-3 Стр. 30	 D2-P6 Стр. 40	 P64-bT Стр. 48
		 D4-P64 Стр. 48		

Фиксация абатмента с усилием в 25 Н/см.
Фиксация винта, удерживающего манжету с усилием в 20 Н/см.
Фиксация формирователя с усилием в 20 Н/см.

Абатменты / Манжеты / Аттачменты			
Прямые	Угловые	Индивидуальные	Лабораторные
 P3-3 Стр. 35 P3W-3 Стр. 35	 P4-3 Стр. 36 P4L-3 Стр. 36	 P9HR-3 Стр. 37 P9R-3 Стр. 37	 P15-3 Стр. 43 P15C-3 Стр. 43
 P3S Стр. 35 PK-P3-3 Стр. 44	 P4S-3 Стр. 36	 P2N Стр. 38 P2NH Стр. 38	 P16C-3 Стр. 43 P6HC-3 Стр. 43
 P16 Стр. 47	 P4SC-3 Стр. 47	 P14-bR Стр. 46 P14-b Стр. 46	 P6H-bTH Стр. 41
 P64 Стр. 49	 P64 Стр. 49	 P64b Стр. 48	 P6HC-4,3 Стр. 41
 P5-3 Стр. 52 P15C-4 Стр. 53	 P14BASE-3 Стр. 55 P5-P14 Стр. 55 P25-P14 Стр. 55		

P0 ФОРМИРОВАТЕЛЬ ДЕСНЫ ТИТАНОВЫЙ

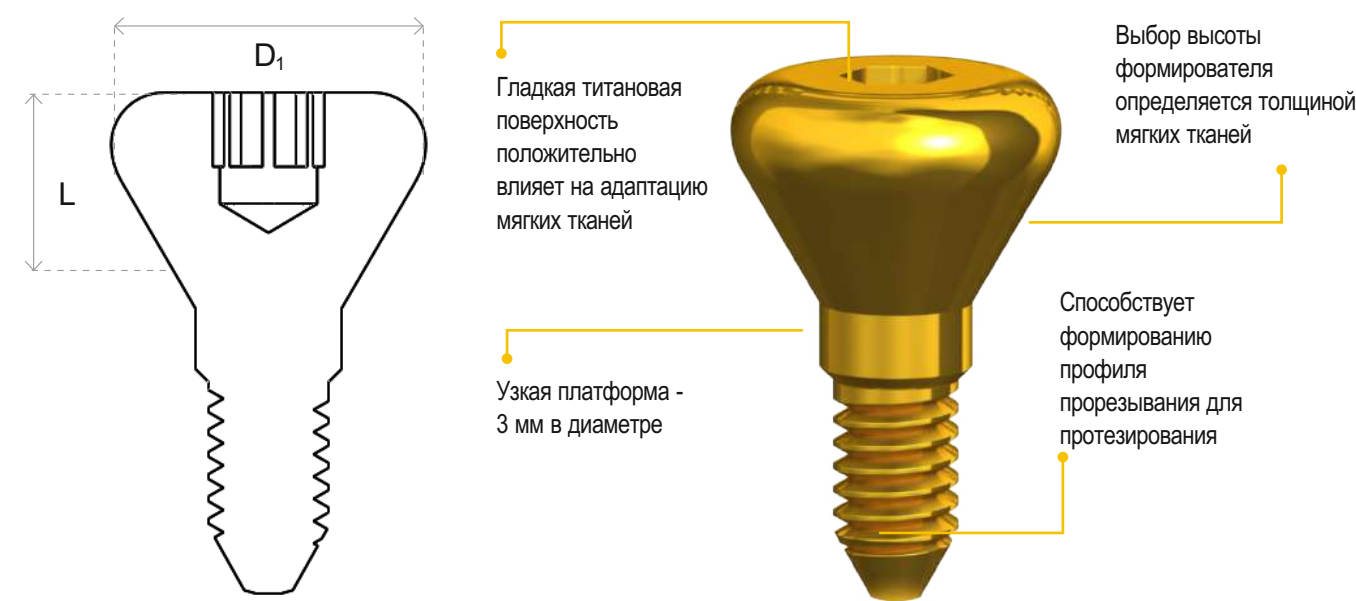

P0

Формирователь десны титановый

P0-3,2

P0-3,3


P0-3,4

P0-3,5

P0-3,7

D₁ (mm) = 4.2
L (mm) = 2, 3, 4, 5, 7

D2 ТРАНСФЕР

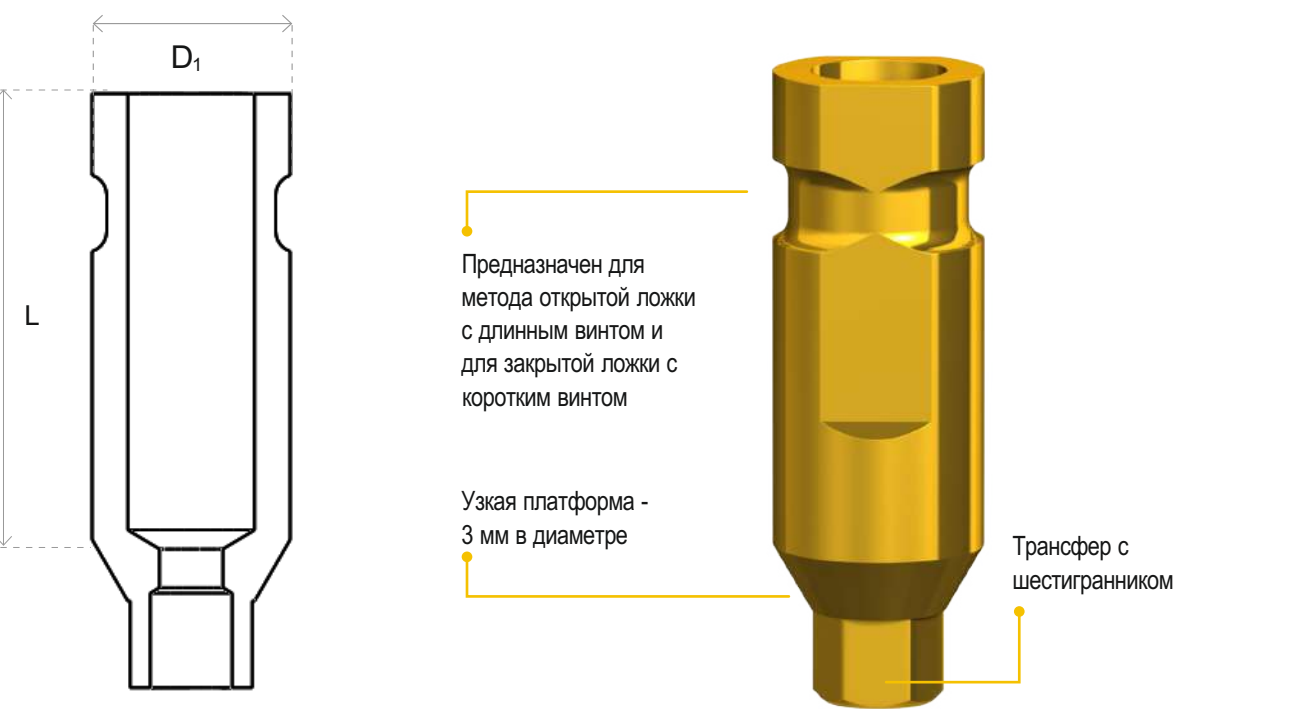

D2

Трансфер для закрытой оттисковой ложки

D2-3,9



D₁ (mm) = 3.75
L (mm) = 9

D2O

Трансфер для открытой оттисковой ложки

D2O-3,15

D₁ (mm) = 4.5
L (mm) = 15

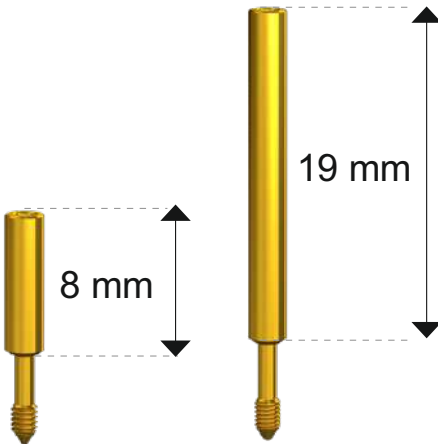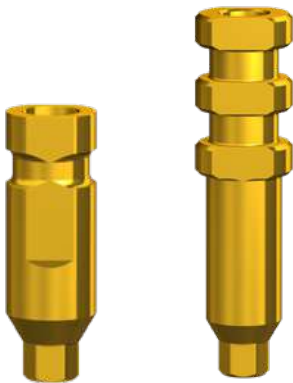


Трансферы D2 выпускаются с винтами. Короткий винт – для закрытой оттисковой ложки, а длинный винт – для открытой оттисковой ложки.


D2a-3

D2aI-3

D3 ТРАНСФЕР С КЛИПСОВОЙ ФИКСАЦИЕЙ

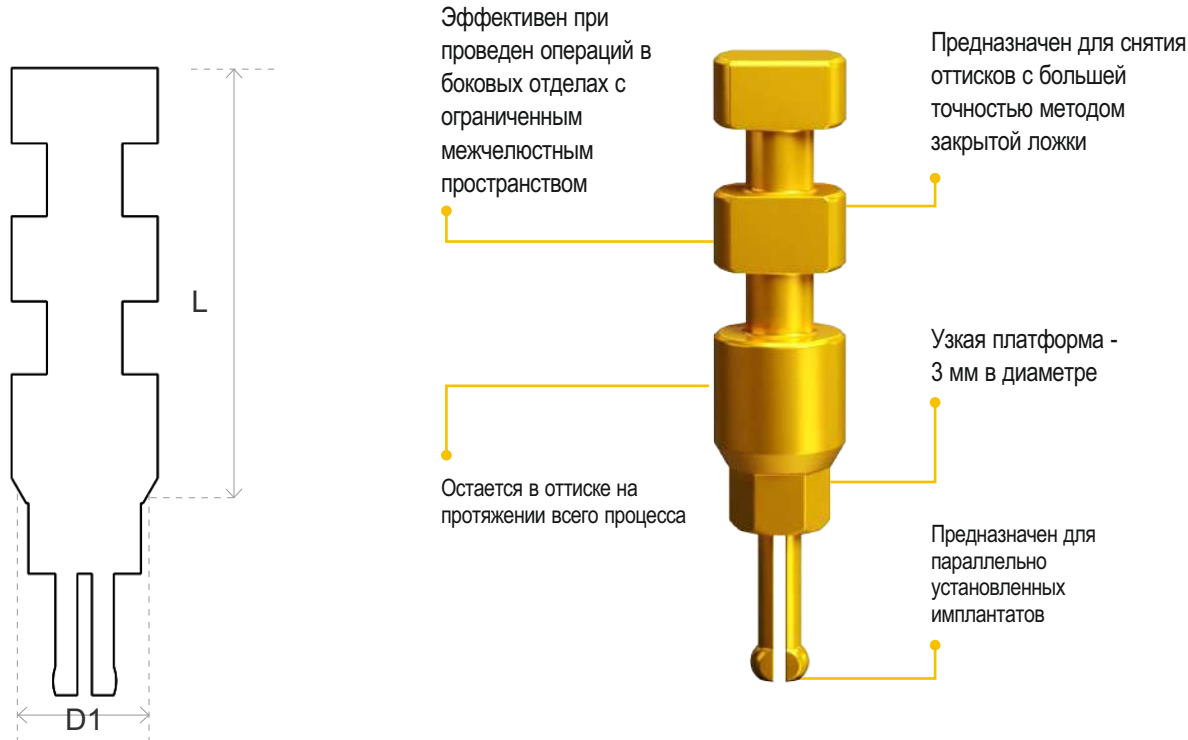

D3	D3W
Трансфер с клипсовой фиксацией	Трансфер широкий с клипсовой фиксацией
D3-3,9	D3W-3,9
D ₁ (mm) = 3.5	D ₁ (mm) = 4.5
L (mm) = 9	L (mm) = 9

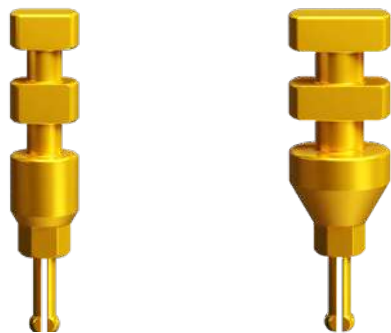


D4 КОМПЛЕКТ: ТРАНСФЕР С ПЛАСТИКОВЫМ АБАТМЕНТОМ



В комплект входят: трансфер РК-D2 (3 элемента), абатмент РК-P3-3, аналог D1-3


D4-3	D1-3
Трансфер	Аналог имплантата для узкой платформы
D4-3,1	
D4-3,2	ПК-D2
D4-3,3	Пластиковый трансфер
D ₁ (mm) = 5.17	
L (mm) = 1,2,3	ПК-P3-3
	Анатомический антиротационный абатмент для узкой платформы

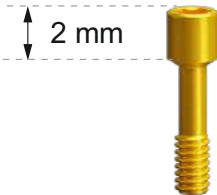

Ко всем абатментам прилагается винт.

P3a-3

D1 АНАЛОГ

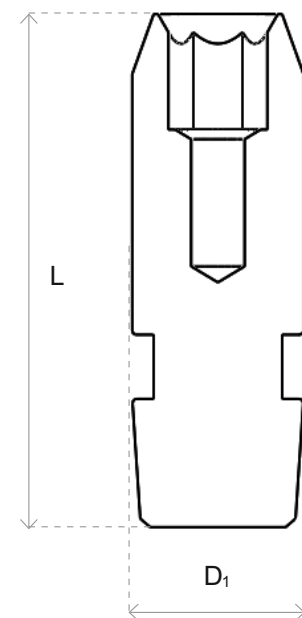

Выполнен из нержавеющей стали и предназначен для лабораторных изделий



Узкая платформа - 3 мм в диаметре

D1-3


Аналог

D1-3


D₁ (mm) = 4

L (mm) = 12


ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ ЦЕМЕНТНОЙ ФИКСАЦИИ УЗКАЯ ПЛАТФОРМА

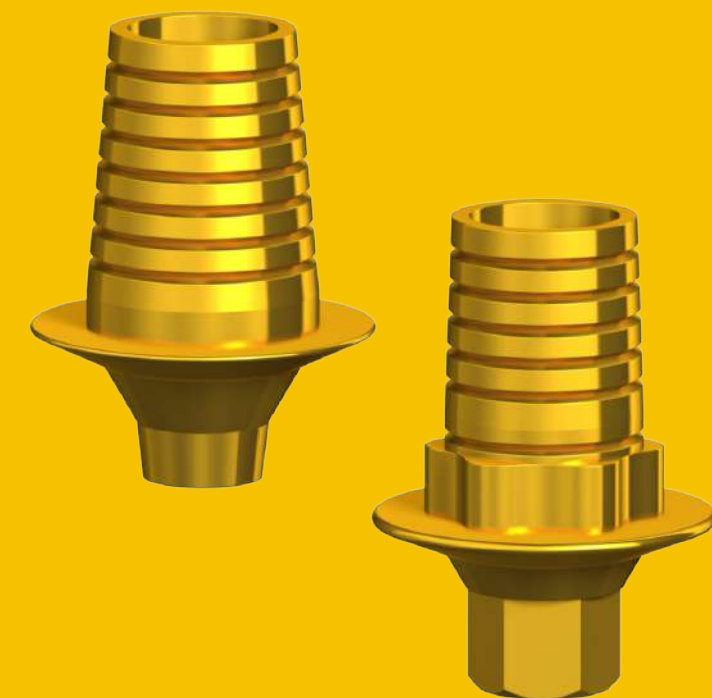

Р3S-РЕЕК АБАТМЕНТ АНТИРОТАЦИОННЫЙ АНАТОМИЧЕСКИЙ ДЛЯ ВРЕМЕННЫХ РЕСТАВРАЦИЙ

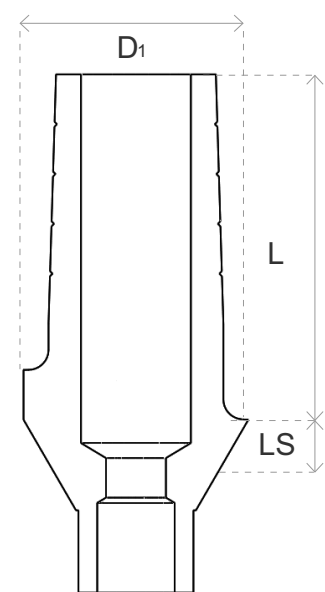

Высококачественный биосовместимый термопластичный полимер, предназначенный для временного протезирования

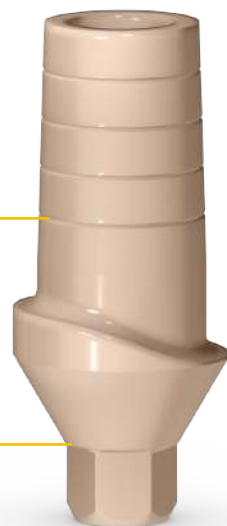

Узкая платформа - 3 мм в диаметре

P3S PEEK


Абатмент анатомический антиротационный Реек для временной реставрации

P3S-PEEK-3,1

P3S-PEEK-3,2

P3S-PEEK-3,3


D1 (mm) = 4.5
L (mm) = 7.4
LS (mm) = 1, 2, 3

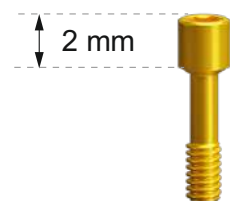

Ко всем абатментам прилагается винт.

P3a-3

Р3 АБАТМЕНТ АНТИРОТАЦИОННЫЙ

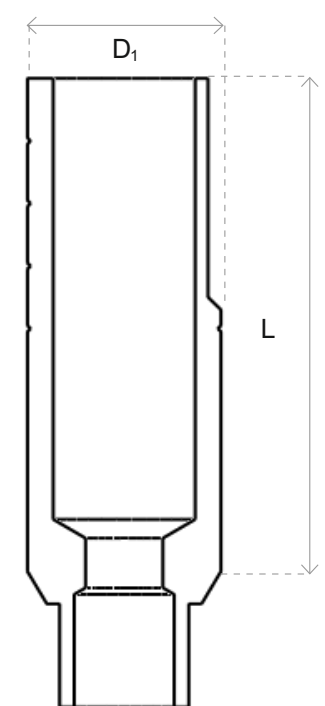


Применяется для постоянного протезирования на имплантатах



Прямой титановый абатмент с шестигранником

Узкая платформа - 3 мм в диаметре


P3	P3W	P3S
Абатмент антиротационный	Абатмент антиротационный широкий	Абатмент антиротационный анатомический
P3-3,9	P3W-3,9	P3S-3,1
P3-3,12		P3S-3,2
		P3S-3,3
D1 (mm) = 3 L (mm) = 9, 12	D1 (mm) = 4 L (mm) = 9	D=3.8 L=7.5 LS=1,2,3

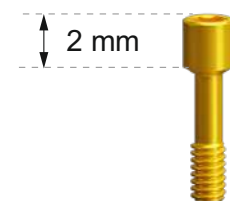

Ко всем абатментам прилагается винт.

P3a-3

P4 АБАТМЕНТ УГЛОВОЙ

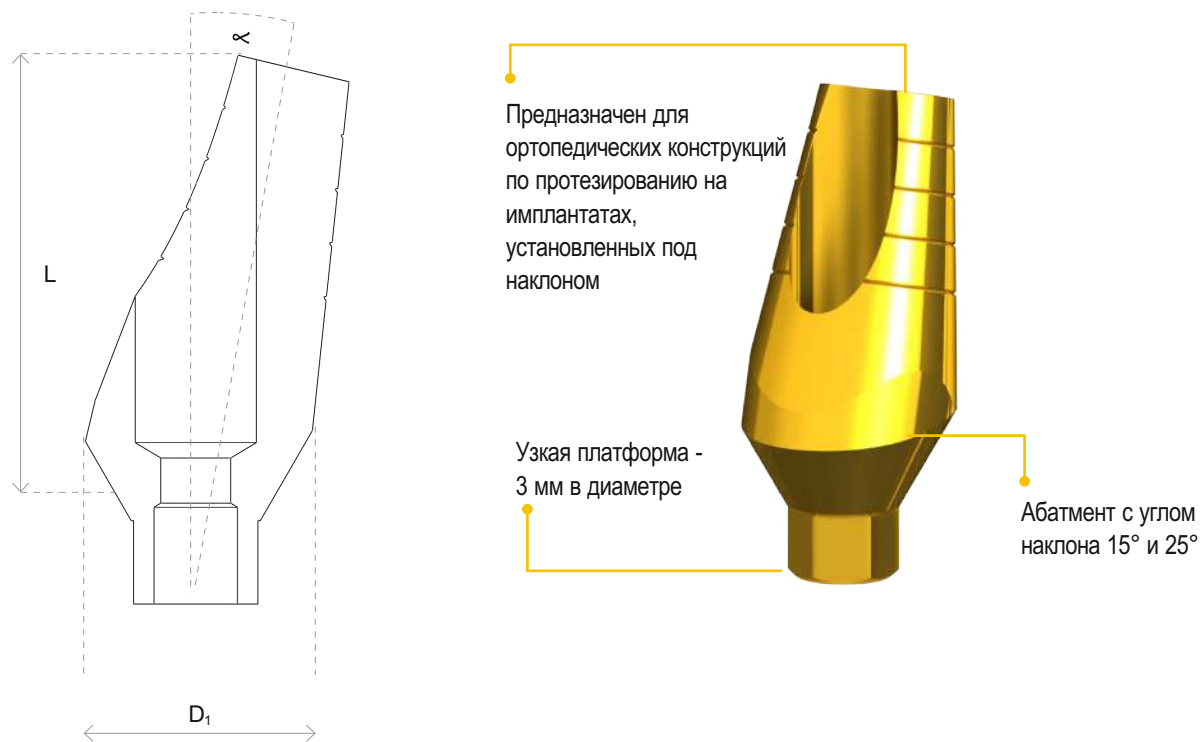

P4	P4L	P4S-15
Абатмент угловой	Абатмент угловой удлиненный	Абатмент угловой анатомический 15° с уступом
P4-3,15	P4L-3,15	P4S-3,15-1
P4-3,25	P4L-3,25	P4S-3,15-2
		P4S-3,15-3
$D_1 (mm) = 4.2$ $\approx 15^\circ, 25^\circ$ $L (mm) = 8$	$D_1 (mm) = 4.5$ для 15° $D_1 (mm) = 4.7$ для 25° $\approx 15^\circ, 25^\circ$ $L (mm) = 13$	$D_1 (mm) = 4.1$ $\approx 15^\circ$ $L (mm) = 7$ $LS (mm) = 1, 2, 3$



Ко всем абатментам прилагается винт.

P3a-3

P9 АБАТМЕНТ ПЛАСТИКОВЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОТЛИВКИ



P9HR	P9R
Абатмент пластиковый с шестигранником с основанием из хром-кобальта	Абатмент пластиковый без шестигранника с основанием из хром-кобальта
P9HR-3,11	P9R-3,11
$D_1 (mm) = 4$ $L (mm) = 11$	$D_1 (mm) = 4$ $L (mm) = 11$ $LS (mm) = 1$





Ко всем абатментам прилагается винт.

P3a-3

P2N АБАТМЕНТ ПЛАСТИКОВЫЙ



P2N	P2NH
Абатмент пластиковый без шестигранника прямой (для моста)	Абатмент пластиковый с шестигранником для одиночной контрукции
P2N-3,15	P2NH-3,15
D1 (mm) = 4	D1 (mm) = 4
L (mm) = 7.15	L (mm) = 7.15

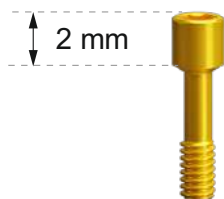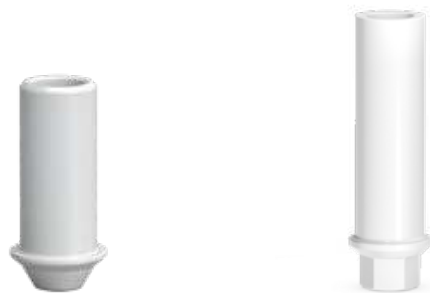


Ко всем абатментам прилагается винт. P3a-3

ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ CAD/CAM УЗКАЯ ПЛАТФОРМА



CAD/CAM СКАН-МАРКЕР

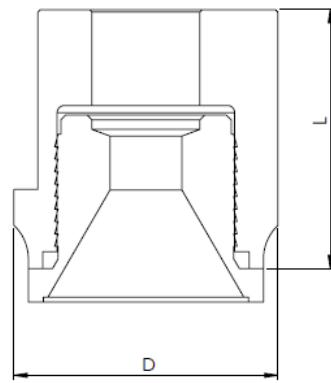

С помощью 3D-библиотек можно создавать точные компьютерные планы будущих конструкций при помощи сканирования с уровня имплантатов или абатментов всех видов

Сканирование производится для позиционирования физического объекта в ПО с помощью CAD/CAM - технологий AB Dental

CAD/CAM-технологии значительно упрощают рабочий процесс и обеспечивают точность и высокую скорость, а также создают комфорт для пациентов




Изделия AB Dental представлены в библиотеках ведущих компаний программного обеспечения

Предназначен для интраорального сканирования и сканирования с уровня моделей

Производится из высококачественного биосовместимого термопластичного полимера (PEEK)

P3SC-PEEK-4,2	P3SC-PEEK-3,2
Скан-маркер	Скан-маркер
P3SC-PEEK-4,2	P3SC-PEEK-3,2
P64 Скан-маркер	P14/P16 Скан-маркер
D (mm) = 5.5	D (mm) = 5.5
L (mm) = 6.1	L (mm) = 6.1

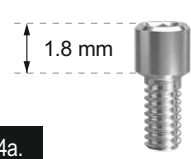


Скан-маркер поставляется вместе с винтом P14a. Модельный аналог также поставляется с винтом.

P14a

Изделия AB Dental включены в библиотеки ведущих CAD/CAM компаний: 3Shape, Exocad, DentalWings. Обновления доступны к загрузке с сайта ab-dent.com

3shape exocad dental wings


CAD/CAM ТИТАНОВЫЕ МАНЖЕТЫ

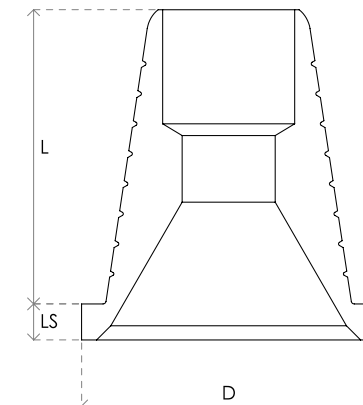

С помощью 3D-библиотек можно создавать точные компьютерные планы будущих конструкций при помощи сканирования с уровня имплантатов или абатментов всех видов

Сканирование производится для позиционирования физического объекта в ПО с помощью CAD/CAM - технологий AB Dental



CAD/CAM-технологии значительно упрощают рабочий процесс и обеспечивают точность и высокую скорость, а также создают комфорт для пациентов

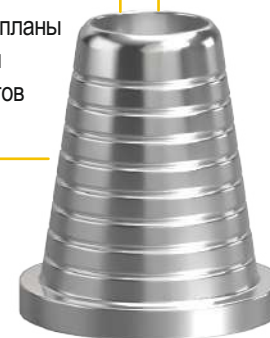

Изделия AB Dental представлены в библиотеках ведущих компаний программного обеспечения

Титановая манжета с уровня абатмента для фиксации коронок и мостов, созданных с помощью CAD/CAM-технологий


P6HC-4,3	P6H-bTH
Титановая коническая манжета для углового адаптера P64	Титановая коническая манжета для углового адаптера P14
P6HC-4,3	P6H-bTH
Титановая коническая манжета для склейки для P64	Титановая коническая манжета для склейки для P14
D (mm) = 4.9	
L (mm) = 5.5	

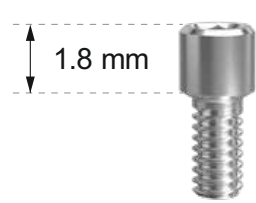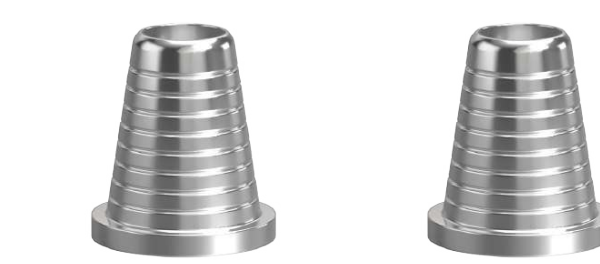

В комплект манжеты входит винт P14a.

P14a

CAD/CAM СКАН-МАРКЕР

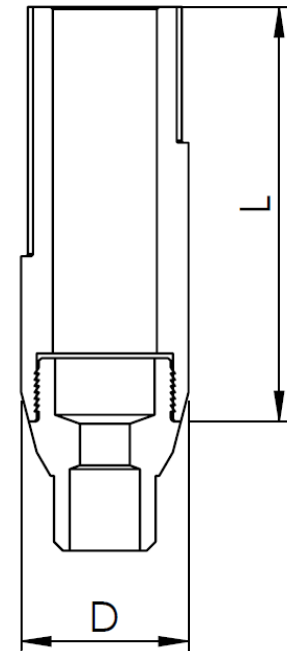

С помощью 3D-библиотек можно создавать точные компьютерные планы будущих конструкций при помощи сканирования с уровня имплантатов или абатментов всех видов

Сканирование производится для позиционирования физического объекта в ПО с помощью CAD/CAM - технологий AB Dental

CAD/CAM-технологии значительно упрощают рабочий процесс и обеспечивают точность и высокую скорость, а также создают комфорт для пациентов

Изделия AB Dental представлены в библиотеках ведущих компаний программного обеспечения


Предназначен для интраорального сканирования и сканирования с уровня моделей

Производится из высококачественного биосовместимого термопластичного полимера (PEEK)

P3SC-PEEK-3,1	P3SC-PEEK-3,3
Скан-маркер короткий	Скан-маркер длинный
P3SC-PEEK-3,1 Узкая платформа	P3SC-PEEK-3,3 Узкая платформа
D (mm) = 4.5 L (mm) = 6,1	D (mm) = 3.7 L (mm) = 10





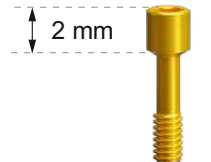

Сканирующие основания абатментов поставляются вместе с коротким винтом P3a-3 для узкой платформы.

P3a-3

Изделия AB Dental включены в библиотеки ведущих CAD/CAM компаний: 3Shape, Exocad, DentalWings. Обновления доступны к загрузке с сайта ab-dent.com

PK-D1-3
аналог для цифровой печати
PK-D1-3 Предназначен для узкой платформы
D (mm) = 3.5 L (mm) = 11 * Включает винт




Аналог для цифровой модели

Двухкомпонентная конструкция

3shape exocad dental wings

CAD/CAM ТИТАНОВЫЕ ОСНОВАНИЯ

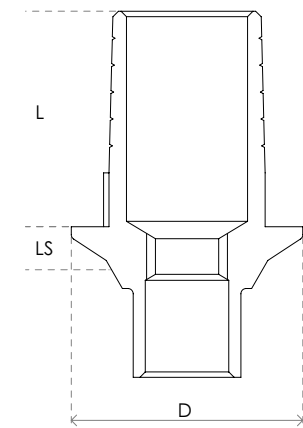

С помощью 3D-библиотек можно создавать точные компьютерные планы будущих конструкций при помощи сканирования с уровня имплантатов или абатментов всех видов

Сканирование производится для позиционирования физического объекта в ПО с помощью CAD/CAM - технологий AB Dental

CAD/CAM-технологии значительно упрощают рабочий процесс и обеспечивают точность и высокую скорость, а также создают комфорт для пациентов

Изделия AB Dental представлены в библиотеках ведущих компаний программного обеспечения


Титановое основание с уровня абатмента для фиксации коронок и мостов, созданных с помощью CAD/CAM-технологий

P15C-3	P6HC-3	P15-3	P16C-3
Стандартное Титановое основание для коронок	Широкое титановое основание для коронок	Антиротационное титановое основание для мостов	Антиротационное широкое титановое основание для мостов
P15C-3,1 H 0.8 мм Узкая платформа	P6HC-3,1.5 H 0.8 мм Узкая платформа	P15-3,1 H 0.6 мм Узкая платформа	P3S-4.5,1-P H 0.8 мм Узкая платформа
P15C-3,2 H 2 мм Узкая платформа		P15-3,3 H 2 мм Узкая платформа	
P15C-3,3 H 3 мм Узкая платформа		P15-3,5 H 3 мм Узкая платформа	
D (mm) = 4.3 L (mm) = 4 LS (mm) = 0.8, 2, 3	D (mm) = 5.2 L (mm) = 4.5 LS (mm) = 0.8	D (mm) = 4.1 L (mm) = 4.1 LS (mm) = 0.6, 2, 3	D (mm) = 5.2 L (mm) = 4.5 LS (mm) = 0.8







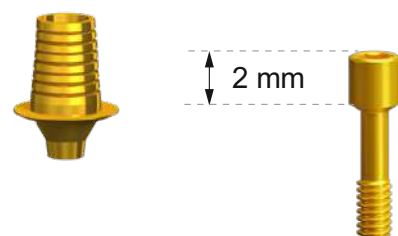

К титановому основанию прилагается короткий винт P3a-3 для узкой платформы.


P3a-3

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ ВИНТОВОЙ ФИКСАЦИИ

УЗКАЯ
ПЛАТФОРМА



P16/P14 ПРЯМОЙ И УГЛОВОЙ АДАПТЕРЫ

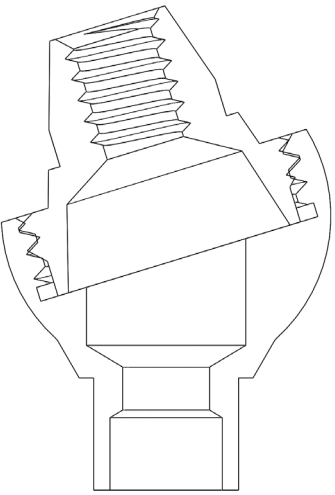

Адаптер (основание и конус) позволяет проводить реабилитацию на имплантатах, установленных под углом

Запатентовано компанией AB Dental

Угол наклона имплантата корректируется за счет основания. Конус обеспечивает соединение временного титанового абатмента с дополнительными компонентами.

Встроенная функция смены платформ способствует созданию идеальных условий для адаптации мягких тканей и минимализирует резорбцию костной ткани


Идеальное решение для конструкций концепта 4x4 AB Dental

ПРИСВОЕН ПАТЕНТ

P0-P14	D2-P14	D1-P14	P14-b
Формирователь десны для P14	Трансфер для P14	Аналог для P14	Манжета для P14
P0-P14,2,5	D2-P14	D1-P14	P14-b – Пластиковая манжета без шестигранника
P0-P14,4			P14-bT – Титановая манжета
P0-P14,5			P14-bR – Хром-кобальт манжета
P0-P14,7			
D ₁ (mm) = 4.4 L (mm) = 2.5, 4, 5, 7	D ₁ (mm) = 4.4 L (mm) = 12.5	D ₁ (mm) = 4.4 L (mm) = 14.2	D ₁ (mm) = 4.4 L (mm) = 10, 12, 12




P14-b P14-bT P14-bR

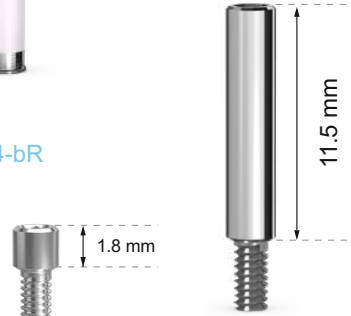

P14a D2-P14a

Ко всем манжетам прилагается винт P14a. К трансферу D2-P14 прилагается винт D2-P14a.

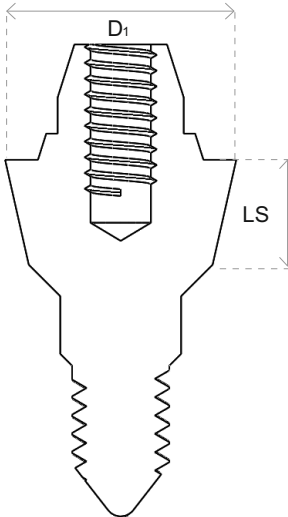

Верхняя часть конуса абатмента компенсирует угол наклона между имплантатами

Условно-съемный протез фиксируется на конус абатмента

Снятие оттиска производится с уровня адаптера-абатмента

Новый дизайн содействует адаптации мягких тканей


Эргономичный процесс фиксации условно-съемных протезов на имплантатах, установленных под наклоном

P16	P4SC-3,15	P4SC-3,25
Адаптер прямой	Адаптер угловой	Адаптер угловой
P16-3,1	P4SC-3,15-2	P4SC-3,25-1
P16-3,2	P4SC-3,15-3	P4SC-3,25-2
P16-3,3		
P16-3,4		
D ₁ (mm) = 4.4 LS (mm) = 1, 2, 3, 4	D ₁ (mm) = 4.4 ≈ 17° LS (mm) = 1.5, 3	D ₁ (mm) = 4.4 ≈ 30° LS (mm) = 1, 3



В комплекты адаптеров P14/P16 входит винт P14a.


Компоненты P14/P16

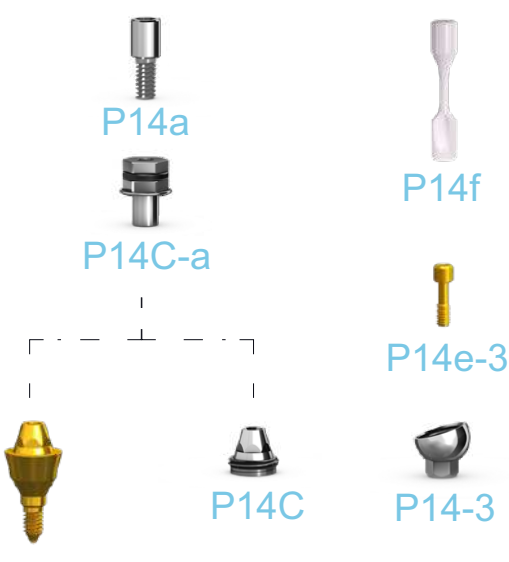



P14a P14C-aL

P64 ПРЯМОЙ И УГЛОВОЙ АДАПТЕРЫ

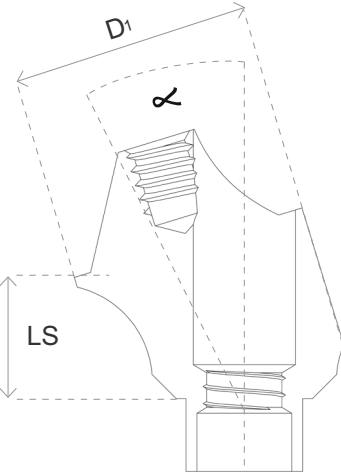


Адаптер (основание и конус) позволяет проводить реабилитацию на имплантатах, установленных под углом

Встроенная функция смены платформ способствует созданию идеальных условий для адаптации мягких тканей и минимализирует резорбцию костной ткани

Широкое отверстие

Доступен с вариантами углов 17° и 30°

Коническая винтовая и глубокая резьба придает дополнительную прочность

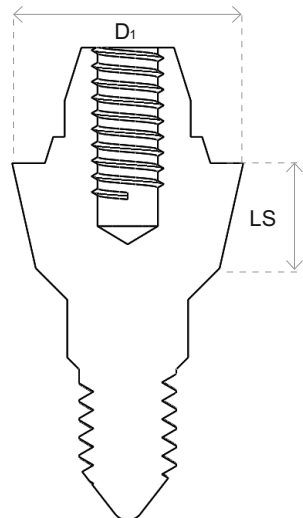

Верхняя часть конуса абатмента компенсирует угол наклона между имплантатами

Условно-съемный протез фиксируется на конус абатмента. Высота может варьироваться

Встроенная функция смены платформ способствует созданию идеальных условий для адаптации мягких тканей и минимализирует резорбцию костной ткани

Снятие оттиска производится с уровня адаптера-абатмента

Новый дизайн содействует адаптации мягких тканей

Эргономичный процесс фиксации условно-съемных протезов на имплантатах, установленных под наклоном

Прямой адаптер, изготовленный из титана

P0-P64	D2-P64	D4-P64	D1-P64	P64-bT	P64b
Формирователь десны для P64	Трансфер для P64	Трансфер с пластиковой оснасткой для P64	Аналог для P64	Аналог для P64	Манжета для P64
P0-P64,5	D2-P64	D4-P64	D1-P64	P64-bT	P64b
D1 (mm) = 4.9 L (mm) = 5	D1 (mm) = 4.9 L (mm) = 10	D1 (mm) = 4.9 L (mm) = 10	D1 (mm) = 4.9 L (mm) = 14.2	D1 (mm) = 4.9 L (mm) = 12	D1 (mm) = 4.9 L (mm) = 10
					

P64	P64-17	P64-30
Прямой адаптер, отдельный элемент	Угловой адаптер, отдельный элемент	Угловой адаптер, отдельный элемент
P64-3,1	P64-3,17-0.5	P64-3,30-0.5
P64-3,2	P64-3,17-2	P64-3,30-2
P64-3,3		
D1 (mm) = 4.9 LS (mm) = 1, 2, 3	D1 (mm) = 4.9 < 17° LS (mm) = 0.5, 2	D1 (mm) = 4.9 < 30° LS (mm) = 0.5, 2





P14a



D2-P14a

Ко всем манжетам прилагается винт P14a. К трансферу D2-P14 прилагается винт D2-P14a.

Угловой адаптер P64 поставляется с винтом P64e-3. Прямой адаптер P64 поставляется с держателем P14Ca и винтом P14a. Угловой адаптер P64 поставляется с кронштейном P64c. Удлиненный кронштейн P14C-aL поставляется опционально.



**УСЛОВНО-СЪЕМНОЕ
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
УЗКАЯ ПЛАТФОРМА**



P5 АТТАЧМЕНТ ШАРОВИДНЫЙ



P5	Аксессуары	P5 Set
Аттачмент шаровидный (поставляется с прозрачным силиконовым колпачком)	Колпачок силиконовый (поставляется в парах того же цвета)	P5 Аттачмент шаровидный + P5b Прозрачный колпачок + P5a Металлический колпачок
P5-3,1	P5b-1 Серый Твердый	P5-3,1set
P5-3,2	P5b-2 Прозрачный Средний	P5-3,2set
P5-3,3	P5b-3 Розовый Мягкий	P5-3,3set
P5-3,4	P5b-4 Черный Лабораторный	P5-3,4set
P5-3,5	P5a Металлический колпачок	P5-3,5set
P5-3,6	P5d Защитный диск	P5-3,6set
D1 (mm) = 3 L (mm) = 1, 2, 3, 4, 5, 6	D1 (mm) = 4 L (mm) = 2.5	




P15C AB LOC АТТАЧМЕНТ



P15C-4	P25-a,b/10	P25-a,b/20	Аксессуары
AB LOC (поставляется с прозрачным силиконовым колпачком)	Колпачок силиконовый (поставляется как набор из 5)	Колпачок силиконовый (поставляется как набор из 5)	Аксессуары
P15C-4,1	Желтый Очень Мягкий	Желтый Очень Мягкий	P25a Металлический колпачок
P15C-4,2	Розовый Мягкий	Розовый Мягкий	P25d Изолирующий диск
P15C-4,3	Пурпурный Твердый	Пурпурный Твердый	
P15C-4,4	Прозрачный Стандартный	Прозрачный Стандартный	
P15C-4,5	Черный Лабораторный	Черный Лабораторный	
P15C-4,6			
D1 (mm) = 3.9 L (mm) = 0.2, 1, 2, 3, 4, 5	D1 (mm) = 4.6 L (mm) = 1.7	D1 (mm) = 4.6 L (mm) = 1.7	

P5-20 АТТАЧМЕНТ
УГЛОВОЙ ШАРОВИДНЫЙ 20°

ПРИСВОЕН ПАТЕНТ

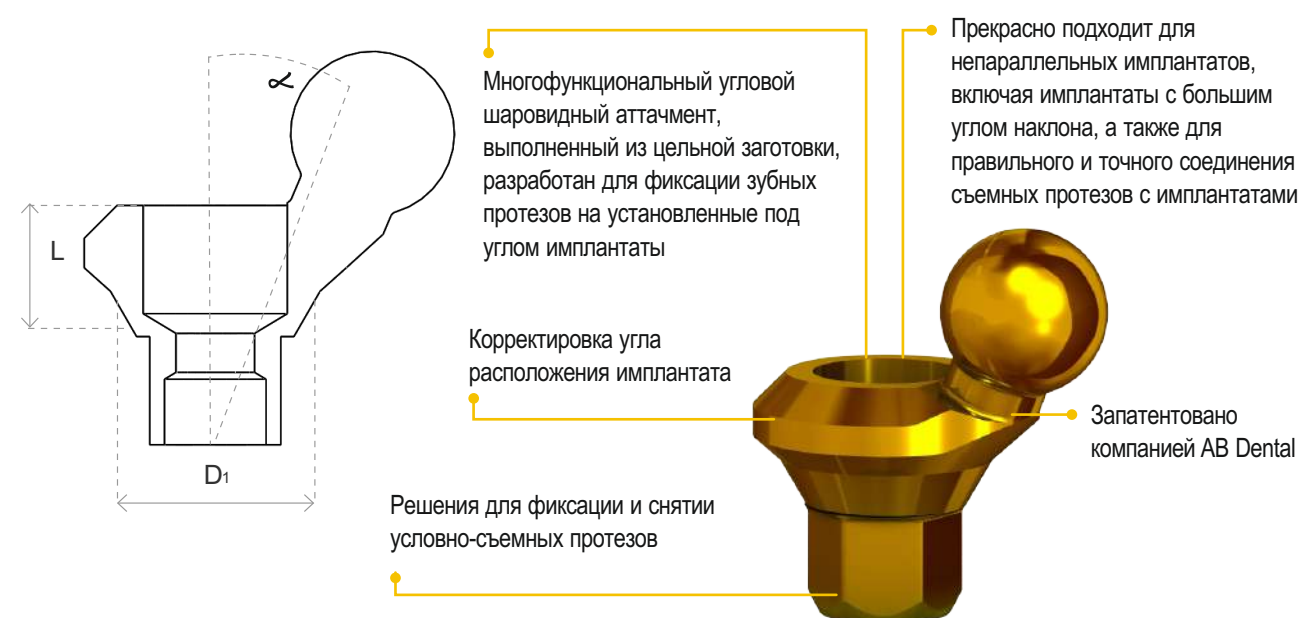

P5-20	Аксессуары	P5-20 Set
Аттачмент шаровидный 20° (поставляется с прозрачной силиконовым колпачком)	Колпачок силиконовый (поставляется в парах того же цвета)	Набор включает в себя: P5 Аттачмент шаровидный + P5b Прозрачный колпачок + P5a Металлический колпачок
P5-3,20-1.5	P5b-1 Серый Твердый	P5-3,20-1.5set
P5-3,20-3	P5b-2 Прозрачный Средний	P5-3,20-3set
P5-3,20-4	P5b-3 Розовый Мягкий	P5-3,20-4set
P5-3,20-5	P5b-4 Черный Лабораторный	P5-3,20-5set
	P5a Металлический колпачок	
	P5d Защитный диск	
D ₁ (mm) = 4.1 α 20° L (mm) = 1.5, 3, 4, 5	D ₁ (mm) = 4 L (mm) = 2.5	



Каждый аттачмент P5-20 поставляется со своим винтом P5-20a (в соответствии с высотой) и силиконовым колпачком.

P5-20a

P5\P25 АТТАЧМЕНТ АДАПТЕР
УГЛОВОЙ

Угловые адаптеры в комбинации с шаровидными и AB LOC аттачментами

P14base,17	P14base,30	P14-P14	P25-P14
Основание для углового адаптера	Основание для углового адаптера	Шаровидное снование для углового адаптера	AB LOC основание для углового адаптера
P14base,17-1	P14base,30-1	P5-P14,1	P25-P14,1
P14base,17-3	P14base,30-3	P5-P14,2	P25-P14,2
D ₁ (mm) = 4.4 α 17° LS (mm) = 1.35, 3.75	D ₁ (mm) = 4.4 α 30° LS (mm) = 1.5, 3	D ₁ (mm) = 4.4 L (mm) = 12	D ₁ (mm) = 4.4 L (mm) = 1,2



Основание P14 комплектуется винтом P14e-3.

P14e-3



TEL +972-8-8531388



www.ab-dent.com